



# EN 2021, “SUPPORTER” DE VOTRE OFFICINE

**Le groupe Lohmann & Rauscher c'est plus de 160 ans d'expérience dédiée à la pharmacie, au service des patients.**

Des bases historiques solides, socle d'une vision résolument tournée vers l'avenir. Au travers des marques Velpeau®, Velpeau® VeinoCare® mais également de notre gamme d'hygiène et soins, chaque année, nous innovons et vous proposons de nouvelles solutions pour vous permettre de toujours **mieux accompagner & prendre en charge vos patients**. En 2021, ce sont ainsi de nombreuses nouvelles références qui intègrent notre catalogue avec notamment le lancement d'**Ankle Control**, première référence de la gamme d'orthèses premium **Velpeau® Expert** ainsi que l'extension de la gamme **Velpeau® VeinoCare®** avec l'ambition affichée de changer le regard sur la compression pour homme.

Une année riche en nouveautés, portée par notre nouvelle plateforme de communication et signature Velpeau® : **“Supporter” des sportifs du quotidien**. L'affirmation de notre engagement à soutenir tous les actifs dans leur vie quotidienne au travers de solutions dispensées à l'officine.



## Nos engagements



### QUALITÉ

Depuis les phases de Recherche et Développement jusqu'à la distribution en passant par la production et le stockage, toutes nos gammes font l'objet d'un travail constant avec les organismes certificateurs : le **TÜV SUD, ASQUAL, GOTS par Ecocert Greenlife**. Toutes nos orthèses sont **validées par des médecins spécialistes** en orthopédie ainsi que par des **évaluateurs cliniques** (indications et utilisations prévues).



### TECHNICITÉ

Tissage Jacquard, tricotage 3D intégral, découpe numérique, assemblage par haute fréquence, transfert thermique, moulage de silicone... **Innovation & haute technologie au service de la prise en charge de vos patients**. Le site de R&D et de production **Richard Frères** (Saint-Genest-Lerpt - 42) est reconnu comme un **centre d'expertise mondiale** en orthopédie pour le groupe L&R.





### RESPONSABLE

Le groupe Lohmann & Rauscher allie **innovation et protection de l'environnement** au travers de sa démarche de responsabilité sociétale dans les domaines économique, social, environnemental, éthique et culturel. **Certifié ISO 14001**, le groupe L&R est engagé dans un principe d'amélioration continue en réduisant son impact environnemental.



CAMPAGNE RÉSEAUX SOCIAUX  
**PLAN DE COMMUNICATION** LinkedIn

### CAMPAGNE PRESSE PRO

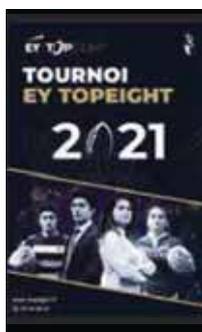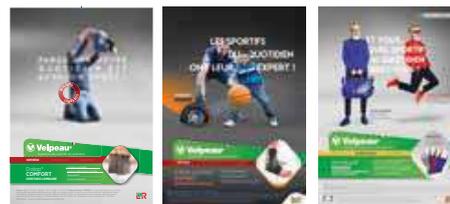

**SPONSORING**  
**Tournoi de rugby**  
**étudiant français**  
TOP EIGHT  
**Championnat**  
**départemental de Derby**  
équitation  
**Golf de Raray**



**CONGRÈS DES PHARMACIENS**  
Partenaire



CAMPAGNE MARKETING DIRECT

**PRESCRIPTEURS**  
**MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES**

**CONGRÈS DE MÉDECINE GÉNÉRALE**  
**& DE TRAUMATOLOGIE 2021**  
Partenaire



UN ESPACE **PRO** AVEC DE NOUVEAUX SERVICES MIS A DISPOSITION [www.velpeau.fr](http://www.velpeau.fr)  
Aides à la délivrance, catalogue et outils de sell-out\* à télécharger.

## AVRIL / AOÛT

## SEPTEMBRE / DECEMBRE

INNOVATION ORTHÈSE

**LANCEMENT**  
Cheville

**NOUVEAU**

**MODULE DE FORMATION**  
Cheville

**CAMPAGNE MARKETING DIRECT**  
Prescripteurs

INNOVATION ORTHÈSE

**LANCEMENT**  
Genou

**NOUVEAU**

**MODULE DE FORMATION**  
Genou

**CAMPAGNE MARKETING DIRECT**  
Prescripteurs

INNOVATION COMPRESSION

**LANCEMENT**  
VelpEAU® VeinoCare®

**NOUVEAU**

**MODULE DE FORMATION + PODCASTS**  
Pharmaciens / Médecins généralistes et Spécialistes  
/ Idel Contention / Compression

**DÉVELOPPEMENT**  
**DE CLASSE VIRTUELLE**  
Orthèse / Compression



CAMPAGNE MARKETING DIRECT  
Prescripteurs contention



CAMPAGNE MARKETING DIRECT  
Médecins généralistes & spécialistes

# AU SERVICE DE VOTRE OFFICINE



## FORMATION

En présentiel ou digital, Velpeau® met à disposition de l'équipe officinale des outils de formation pour accompagner le conseil au comptoir.



## PLV (Promotion sur le lieu de vente)

Quelque soit votre chiffre d'affaires sur ses catégories de références, Velpeau® vous propose des dispositifs adaptés pour assurer la visibilité de votre assortiment, du linéaire jusqu'à la vitrine.



## CONSEIL

Une solution pour chaque patient, Velpeau®, c'est une gamme large et optimisée pour la gestion de votre stock ainsi que des outils d'aide à la délivrance.

et + de **220** groupements partenaires



*Notre service client  
dédié à votre écoute !*

**Pour vous accompagner chaque jour dans la prise en charge de vos patients et le développement de votre officine :**

- 1 Vous conseiller et vous apporter les solutions adaptées à vos besoins,
- 2 Vous délivrer une information claire et transparente sur nos produits, nos services ainsi que nos conditions commerciales,
- 3 Vous garantir écoute, conseil, réactivité et professionnalisme au quotidien.



**Horaires :** nos assistants commerciaux sont à votre disposition du lundi au vendredi de **8 h 30 à 12 h 30** et de **13 h 30 à 17 h 45**.

### Pour passer vos commandes :

- par téléphone : 03 29 26 25 79
- par fax : 03 29 26 25 78
- par pharma ML (contactez-nous pour plus de renseignements)
- par e-mail : pharmacie@fr.LRmed.com



- Les commandes passées avant 12 h 00 sont expédiées le jour même (dans la limite des stocks disponibles).
- Possibilité de livraison le samedi matin si votre commune est livrable (prestation non garantie).
- Franco de port pour toute commande ≥ 40 € HT. Si votre commande passée par fax ou pharma ML n'atteint pas ce montant, nous vous recontactons afin de vous laisser la possibilité de compléter votre commande.



- Pour toute demande d'échange ou de reprise, contactez notre Service client qui vous transmettra un formulaire de retour.

# SOMMAIRE



- p. 8 à 11** Nouveautés orthèses
- p. 12 à 21** Orthèses Tronc / Rachis
- p. 12 à 13 Cou
- p. 14 à 21 Dos



- p. 22 à 35** Orthèses Membres supérieurs
- p. 22 à 27 Épaule/Coude
- p. 28 à 35 Poignet/Main/Pouce



- p. 36 à 51** Orthèses Membres inférieurs
- p. 36 à 43 Genou
- p. 44 à 51 Cheville



- p. 52 à 62** Compression VeinoCare®

Poster d'aide à la délivrance



Boîte de démonstration



Vidéo



Velpeau.fr vidéos de mise en place et formation des équipes

Espace Pro Velpeau.fr accès en replay à des webinaires de formation

Présentoir de comptoir





PLV<sup>1</sup>

Mannequin

Covering<sup>2</sup>

**Velpeau**

Orthopédie

ICI, VOTRE PHARMACIE CONSEIL !

**Velpeau**  
www.velpeau.fr

BIEN PENSÉ  
POUR BIEN  
PANSER.

LARGE GAMME  
ORTHOPÉDIE

DESIGN  
**Velpeau**

Siège cube


1) publicité sur le lieu de vente  
2) adhésif vitrine

# ORTHÈSES




# Prise de mesure


**Cou**  
Circonférence du cou

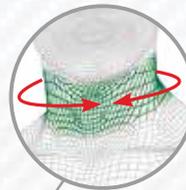


**Carrure**  
Largeur d'épaule

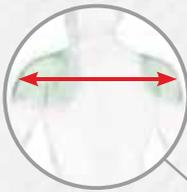

**Poitrine**  
Circonférence de la poitrine sous les bras

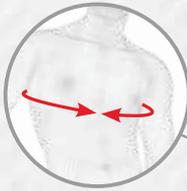


**Coude**  
Circonférence de l'avant-bras 9 cm au-dessous du pli du coude

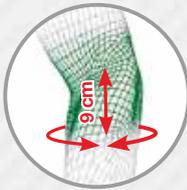

**Tour de taille**  
Circonférence de la taille au niveau du nombril




**Poignet**  
Circonférence du poignet

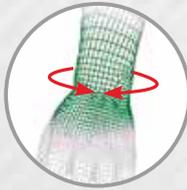



**Cuisse/Genou**  
Circonférence de la cuisse 15 cm au-dessus du centre de la rotule, et du genou au centre de la rotule



**Genou**  
Circonférence du genou au centre de la rotule

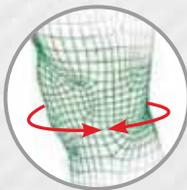

**Cheville**  
Circonférence de la cheville au-dessus des malléoles

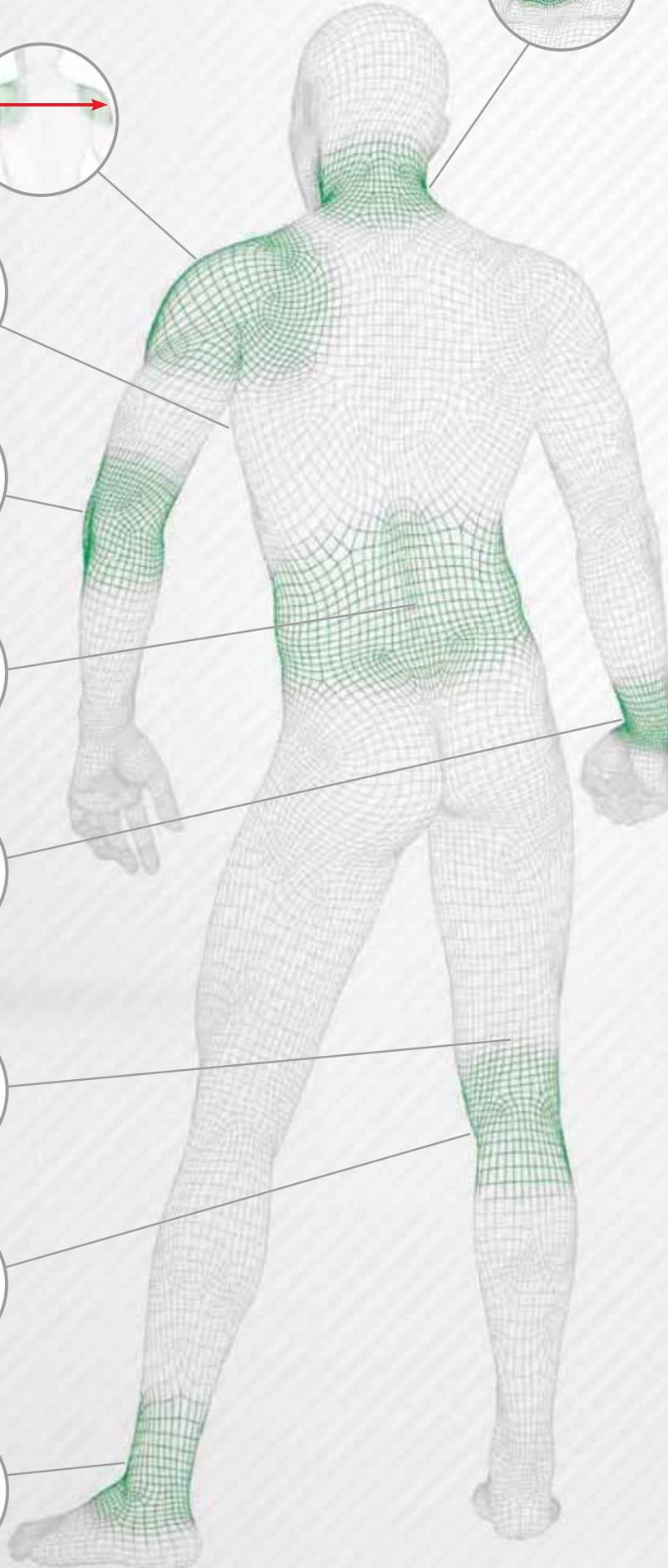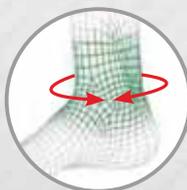


# Velpeau®

“supporter” des sportifs du quotidien,

innove avec  
le lancement

de sa gamme  
**EXPERT**

**NOUVEAU**

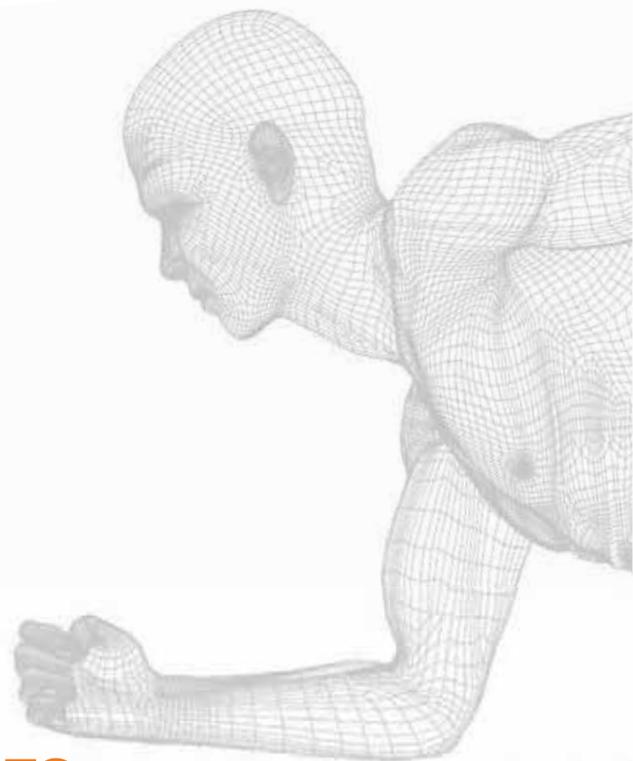

## POUR LES PATIENTS ACTIFS :

- Prévention d'une blessure.
- Reprise d'activité quotidienne / sportive **en limitant** le risque de récurrence.

En prévention de l'entorse ou en phase de **reprise d'activité**, **Velpeau® Ankle Control EXPERT** première orthèse de la gamme **EXPERT**, supporte votre cheville dans toutes les activités quotidiennes sportives ou non.<sup>17</sup>

## INDICATIONS :

- Blessures ligamentaires latérales ou médiales, entorses de grade I et II.
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Hypermobilité localisée ou générale.
- Arthrite rhumatoïde / ostéoarthrose activée.
- Prévention des blessures récurrentes de la cheville en cas de faiblesse.

## MAIS AUSSI :

- Conçue pour une utilisation **QUOTIDIENNE** et **SPORTIVE** à la suite d'une blessure de la cheville.<sup>17</sup>
- Suffisamment fine pour être portée avec des chaussures de sport.<sup>18</sup>
- Velpeau® Ankle Control EXPERT est destinée à un port de longue durée.<sup>19</sup>
- Bilatérale<sup>20</sup> et disponible en 2 tailles.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-074. 3 : DFC-2021-075. 4 : DFC-2021-063. 5 : DFC-2021-076. 6 : DFC-2021-077. 7 : DFC-2021-066. 8 : DFC-2021-065. 9 : DFC-2021-078. 10 : DFC-2021-067. 11 : DFC-2021-079. 12 : DFC-2021-070. 13 : DFC-2021-080. 14 : DFC-2021-081. 15 : DFC-2021-069. 16 : DFC-2021-082. 17 : DFC-2021-073. 18 : DFC-2021-060. 19 : DFC-2021-083. 20 : DFC-2021-061.

## EFFICACITÉ<sup>1</sup>

### Quick Adjust System

- Pour une prise en main facile et rapide<sup>7</sup>
- Permet une utilisation confortable<sup>8</sup>

### Coques latérales

- De forme anatomique<sup>2</sup>
- Aident à réduire l'amplitude des mouvements délétères d'inversion / éversion<sup>3</sup>

### Technologie de tricot moderne<sup>11</sup>

- Matériaux respectueux de la peau<sup>12\*</sup>
- Non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex<sup>13</sup>

## SIMPLICITÉ<sup>6</sup>

### Large ouverture

- S'utilise aisément même avec un oedème<sup>9</sup>
- Peut être enfilée et retirée facilement<sup>10</sup>

## CONFORT

### Confortable au porter<sup>14</sup>

- Zone de confort au niveau du cou-de-pied<sup>15</sup>
- Rembourrage en matériaux doux et confortables<sup>16</sup>

### Eclisse en U

Le strap en forme de 8 contribue à restreindre les mouvements de supination et de pronation<sup>4</sup> et apporte une bonne stabilisation<sup>5</sup>

\* d'après des tests in vitro et études bibliographiques.

# ORTHÈSES Tronc / Rachis

Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**



## ORTHÈSES COU

Cervix 1 Classic	Cervix 2 Classic
	
Syndromes douloureux Torticolis	Syndromes douloureux Distorsion de la colonne cervicale

CLASSIC

## Cervix® 1

Velpeau® Cervix 1 Classic est un collier cervical prêt à l'emploi de forme anatomique pour soutien léger. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale), spondylarthrite.



 Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

### DM Classe I

Code LPP : 7121630

9,<sup>25</sup>€

LPP

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	4056649516453	4056649516477	4056649516491	4056649516514	4056649516538	4056649516552	4056649516576	4056649516590	4056649516613
Réf.	34060	34061	34062	34063	34064	34065	34066	34067	34068

CLASSIC

## Cervix® 2

Velpeau® Cervix 2 Classic est un collier cervical prêt à l'emploi de forme anatomique avec renfort et chanfrein sous le menton pour soutien moyen. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale), spondylarthrite.



 Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

### DM Classe I

Code LPP : 7121646

13,<sup>10</sup>€

LPP

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	4056649516637	4056649516651	4056649516675	4056649516699	4056649516712	4056649516736	4056649516750	4056649516774	4056649516798
Réf.	34070	34071	34072	34073	34074	34075	34076	34077	34078



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



Visionnez notre webinar sur les maux du dos : rendez-vous dans l'espace **PRO Velpeau.fr**

## ORTHÈSES DOS

<p><b>Materna Classic</b> <b>Materna Comfort</b></p>  <p><b>Lombalgie (femme enceinte)</b></p>	<p><b>Dorsamix Comfort</b></p>  <p><b>Syndrome douloureux Lombalgie chronique</b></p>	<p><b>Dorsafit Comfort</b> 21/26</p>  <p><b>Syndrome douloureux Lombalgie chronique</b></p>
<p><b>Vertélibre Comfort</b></p>  <p><b>Lombalgie aiguë Lombalgie chronique</b></p>	<p><b>Dorsamix Classic</b> 21/26</p>  <p><b>Lombalgie aiguë</b></p>	<p><b>Dotop Comfort</b> <b>Dotop Lady Comfort</b></p>  <p><b>Lombalgie aiguë Discopathie</b></p>

L'organisation du rachis repose sur une triple finalité : Stabilité et mobilité, assurées par le disque intervertébral et les structures ligamentaires antérieures et postérieures, et protection du système nerveux dans le canal rachidien. La moelle s'arrête au niveau du L2.

\* L'observatoire du mouvement 2007.

Le disque intervertébral est formé d'une partie centrale très hydratée (80 %) de type cartilagineux et d'une structure périphérique de type ligamentaire. A l'étape lombaire, la charge est importante (60 % du poids du corps) au niveau L4-L5 en position debout. Elle augmente en position assise et en flexion antérieure.\*

# EN PRATIQUE

## Immobilisation rachidienne

Limitation articulaire sur les amplitudes extrêmes de :

- Extension
- Inclinaison latérale
- Rotation du buste
- Flexion  
(limitation moins certaine)

## Rappel postural

Le port d'une ceinture lombaire augmente de façon inconsciente la sensibilité proprioceptive

# Mode d'action ceintures lombaires

## Correction de l'hyperlordose lombaire

Correction effective à l'aide des sangles de rappel, avec une meilleure correction si ces sangles de rappel sont accrochées au niveau pubien

## Effet de caisson abdominal

Les CSL soutiennent et renforcent la ceinture abdominale en modifiant la posture par :

- L'augmentation de la pression intra-abdominale
- La diminution de la pression exercée sur les disques intervertébraux

Les lombalgies sont fréquentes :

**84%**

des personnes ont eu ou auront une lombalgie\*

\* Ameli.fr, Consulté le 18/02/2021 - Sources : Article Profession Pharmacien Supplément au N° 139 Octobre 2018 - Juliette SCHENCKÉRY - Rédactrice en chef, Dr en pharmacie

HAUTEUR  
21  
cm



Retrouvez  
nos vidéos sur  
[Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

CLASSIC

## Materna

Velpeau® Materna Classic est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacroiliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.

DM Classe I

Code LPP : 201E00.021

47,19€

LPP

Taille unique	Réf.	Circonférence de la hanche (cm)	1
Coloris ■	109680	80-125	4056649550198

HAUTEUR  
26  
cm



Retrouvez  
nos vidéos sur  
[Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

COMFORT

## Materna

Velpeau® Materna Comfort est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacroiliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.


DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,86€

LPP

Tour de hanche (cm)	80-95	95-110	110-125	125-140
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576037	4056649576051	4056649576075	4056649576099
Réf.	129980	129981	129982	129983

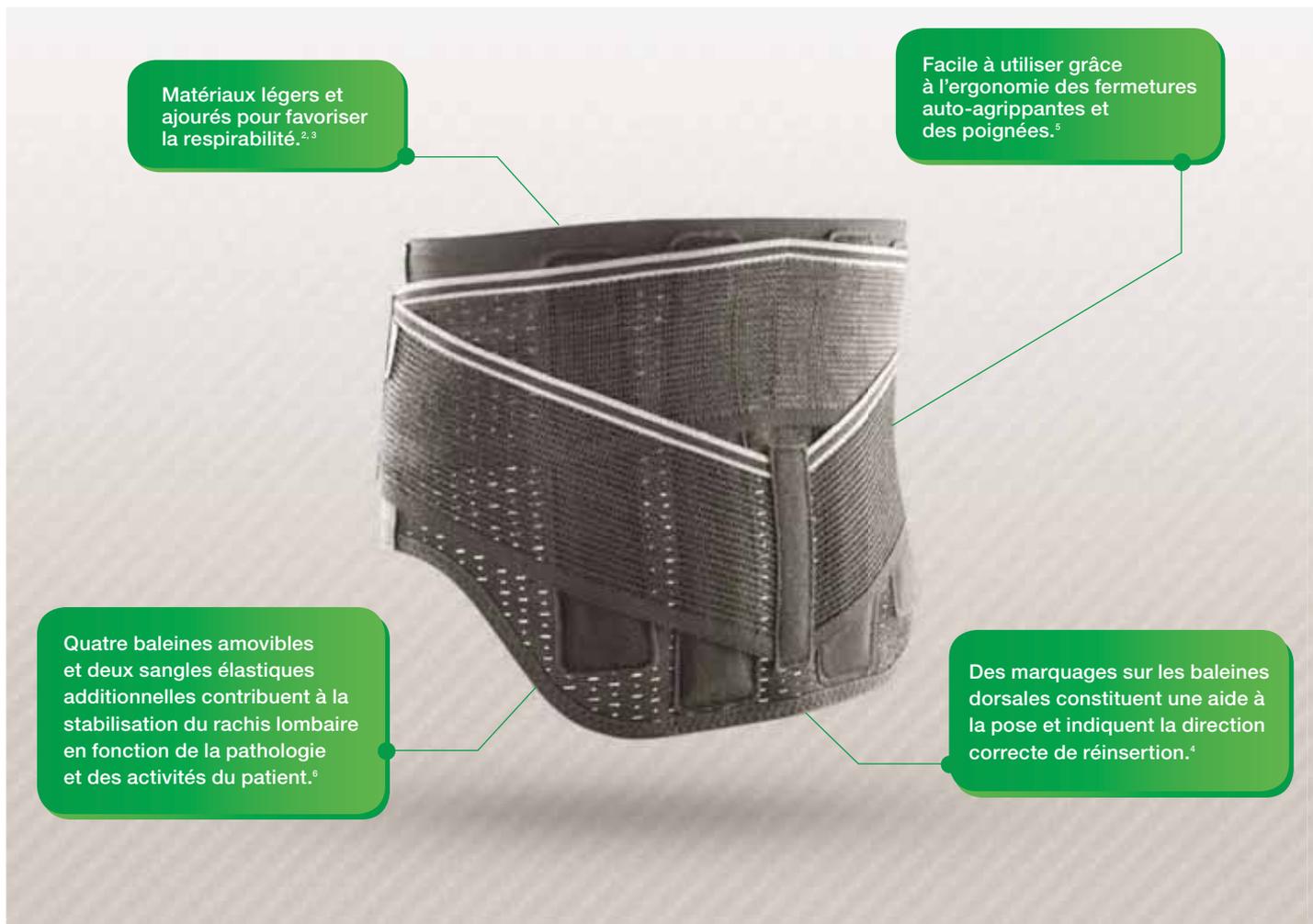

Matériaux légers et ajourés pour favoriser la respirabilité.<sup>2,3</sup>

Facile à utiliser grâce à l'ergonomie des fermetures auto-agrippantes et des poignées.<sup>5</sup>

Quatre baleines amovibles et deux sangles élastiques additionnelles contribuent à la stabilisation du rachis lombaire en fonction de la pathologie et des activités du patient.<sup>6</sup>

Des marquages sur les baleines dorsales constituent une aide à la pose et indiquent la direction correcte de réinsertion.<sup>4</sup>

**COMFORT**

**Dorsamix®**

Velpeau® Dorsamix Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines amovibles assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles élastiques additionnelles, à attacher à la partie frontale de l'orthèse via la fermeture auto-agrippante, complètent l'effet stabilisant et facilitent l'ajustement individuel de l'orthèse.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-074. 3 : DFC-2019-081. 4 : DFC-2019-080. 5 : DFC-2019-078. 6 : DFC-2020-065.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.



**DM Classe I**

Code LPP : 201E00.022

**55,86€** LPP

Tour de taille (cm)	65-85	85-105	105-125
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649781189	4056649781196	4056649781202
Réf.	190016	190017	190018

Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

COMFORT

**Dorsafit®**

Velpeau® Dorsafit Comfort est une ceinture de soutien lombaire avec un effet stabilisant. Quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.

**DM Classe I**

Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Hauteur 21 cm

**47,19€**

LPP

Hauteur 26 cm

**55,86€**

LPP

Tour de taille (cm)	65-80	80-95	95-110	110-125
Taille	1	2	3	4
<b>Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021</b>				
Coloris ■	4056649583011	4056649583028	4056649583035	4056649583042
Réf.	190000	190001	190002	190003
<b>Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022</b>				
Coloris ■	4056649431091	4056649431114	4056649519218	4056649431138
Réf.	108660	108661	108662	108663

Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**

**MODÈLE  
BREVETÉ**



COMFORT

**Vertélibre®**

Velpeau® Vertélibre Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines rigides assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles supplémentaires de contention élastiques qui doivent être attachées sur la face avant de l'orthèse par la fermeture auto-agrippante complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. Les sangles élastiques peuvent être pivotées de 180 degrés, en cas de besoin.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.



**Rotation**  
(2 positions)

**DM Classe I**

Code LPP : 201E00.022

**55,86€**

LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-95	95-115	115-135	> 135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649515579	4056649515593	4056649515616	4056649515630	4056649515654
Réf.	30971	30972	30973	30974	30975



CLASSIC

## Dorsamix®

Velpeau® Dorsamix Classic est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Six baleines rigides (2 abdominales et 4 dorsales) assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Les deux baleines latérales sont amovibles. Deux sangles de contention élastiques complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. L'ouverture et la fermeture sont facilitées par les passe-mains Velpeau® lock.¹

¹ : Notice d'utilisation.

**Indications :** Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.

### DM Classe 1

Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Hauteur 21 cm

47,19€

LPP

Hauteur 26 cm

55,86€

LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Taille	1	2	3	4	5
<b>Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021</b>					
Coloris ■	4056649515777	4056649515791	4056649515814	4056649515838	4056649515852
Réf.	32661	32662	32663	32664	32665
<b>Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022</b>					
Coloris ■	4056649515951	4056649516019	4056649516033	4056649516015	4056649516071
Réf.	32955	32956	32957	32958	32959

 Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



COMFORT

**Dotop® NOUVEAU**

**Stabilise², soulage³ avec un confort de port⁴**

Velpeau® Dotop Comfort est une orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système de sangles additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire.¹

1 : Notice d'utilisation 2 : DFC-2020-059 3 : DFC-2020-060 4 : DFC-2020-061.

**Indications Dotop® :** Syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire, de protrusions/prolapsus des disques intervertébraux dans la région du rachis lombaire, de spondylarthrose dans la région du rachis lombaire, spondylolyse avec ou sans spondylolisthésis (stade I). Traitement de suivi d'opération des disques intervertébraux.

**Indications Dotop® Lady :** Lombalgies aiguës, discopathies (sciatique, cruralgie), lombalgies chroniques (utilisation des extenseurs en résistance progressive).

**Dotop®**

DM Classe I

Code LPP : 201E00.022


**55,86€ LPP**

Tour de taille (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-145
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4063591108339	4063591108353	4063591108377	4063591108476	4063591108490
Réf.	190295	190296	190297	190298	190299

Principe de la pince ouvrante

SSR

Point d'appui

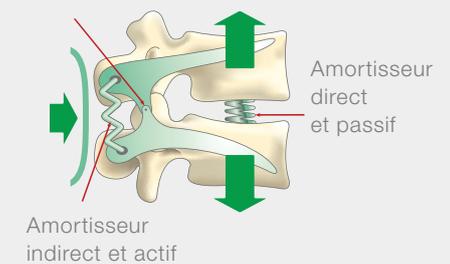

Principe de correction

Correction d'une position pathologique en lordose physiologique



**Dotop® Lady**

DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

**55,86€ LPP**

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649515036	4056649515050	4056649515074	4056649515098	4056649515111
Réf.	24635	24636	24638	24639	24640



Dotop® Lady



CLASSIC

## Velpeau Thorax

Velpeau® Thorax Classic est une orthèse pour la stabilisation de la région thoracique.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Après opération du thorax, fractures des côtes, traitement conservateur de contusions du thorax.

DM Classe I

Non remboursé

Tour de taille (cm)	65-100	95-125	75-110	105-145
Taille	1 F (Femmes)	2 F (Femmes)	1 M (Hommes)	2 M (Hommes)
Coloris □	8436003478171	8436003478188	8436003478195	8436003478201
Réf.	140591	140592	140593	140594

CLASSIC

## Velpeau Abdominal

Velpeau® Abdominal Classic est une orthèse pour la stabilisation de la région abdominale.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Support pré ou postopératoire d'une hernie inguinale réductible unilatérale ou bilatérale non compliquée.

DM Classe I

Code LPP : 201E00.032

71,<sup>90</sup>€

LPP

Tour de taille (cm)	< 120	120-150	> 150
Taille	1	2	3
Coloris □	4063591222240	4063591222301	4063591222325
Réf.	140891	140892	140893

CLASSIC

## Bandage herniaire

**Indications :** Support pré ou postopératoire d'une hernie inguinale réductible unilatérale ou bilatérale non compliquée.



DM Classe I

Code LPP : 201A00.23

33,<sup>72</sup>€

LPP

Tour de taille (cm)	76-89	89-104	104-117
Taille	1	2	3
Coloris □	4056649518419	4056649518433	4056649518457
Réf.	82358	82359	82360

# ORTHÈSES

## Membres supérieurs

Retrouvez  
nos vidéos sur  
[Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)



### ORTHÈSES ÉPAULE / COUDE

EpBloc Classic	Echarpe d'immobilisation Classic	Gilet orthopédique Comfort	Epi Comfort
			
<p>Immobilisation</p>	<p>Immobilisation</p>	<p>Contention Immobilisation</p>	<p>Tendinopathie</p>



## ZOOM SUR...

### L'épicondylite latérale (Tennis elbow) et L'épicondylite médiale (Golf elbow)

Au quotidien, **éviter les mouvements de préhension** forcée (mouvement avec un tournevis). Selon la prescription du médecin, une attelle de poignet peut être utile pour limiter les mouvements douloureux.

Dans le cadre sportif (tennis, golf), **adapter le matériel** à la morphologie et à la pratique. Un bracelet épicondylien avec son effet de contention peut être utilisé pendant l'exercice, en cas de douleur. Les conseils d'un professionnel, pour corriger le geste sportif, limitera le risque de récurrence.

Selon la situation, de la kinésithérapie pourra être prescrite par le médecin traitant.

Source : DF-2020-037



CLASSIC

## EpBloc


Velpeau® EpBloc Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras dans une position déterminée. L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation 2 : DF-2018-014. 3 : DF-2018-015.

**Indications :** Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude. Paralyse des extrémités supérieures.

Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

Mise en place côté droit (Découvrez la mise en place côté gauche en vidéo sur Youtube) :

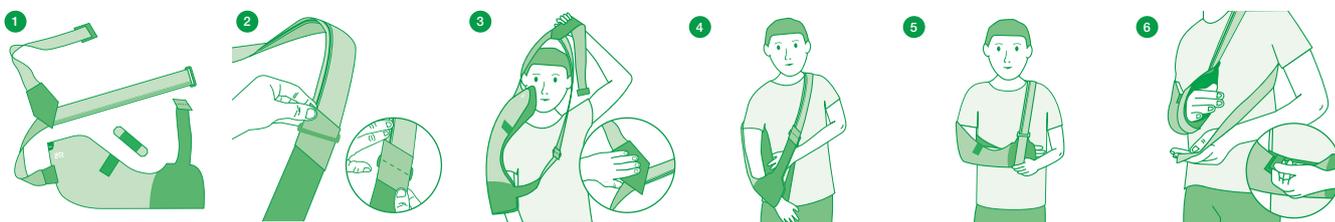

DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€

LPP

Tour de poitrine (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-140
Taille	0	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576105	4056649576112	4056649576129	4056649576136	4056649576143
Réf.	109580	109581	109582	109583	109584

COMFORT

## Gilet orthopédique

Orthèse pour l'immobilisation des articulations de l'épaule et du bras dans une position déterminée.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude. Paralyse des extrémités supérieures.

MODÈLE  
BREVETÉ



DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€

LPP

Tour de poitrine (cm)	60-75	70-90	90-120	> 120
Taille	0	1	2	3
Coloris ■	4021447945361	4056649514633	4056649514657	4056649514619
Réf.	18417	18228	18229	18199

CLASSIC

## Écharpe d'immobilisation

Orthèse pour l'immobilisation des articulations de l'épaule et du bras dans une position déterminée.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude. Paralyse des extrémités supérieures.

DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€

LPP

Tour de poitrine (cm)	70-100	100-130	> 130
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649518051	4056649518075	4056649518099
Réf.	82252	82253	82254

CLASSIC

## Support d'avant-bras

Support du membre supérieur : en coton, rembourrage en mousse.<sup>1</sup>

1 : Etiquetage.

**Indications :** Support du membre supérieur : port de plâtre, paralysie.

DM Classe I

Non remboursé

Taille unique	1
Coloris ■	4056649518174
Réf.	82269





CLASSIC

## Clavicula

Velpeau® Clavicula Classic est un bandage pour l'immobilisation de la ceinture scapulaire selon le principe du bandage en huit classique. Bandage pour réduire la mobilité de la clavicule et mettre les épaules en extension.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement conservatoire des fractures de la clavicule. Soins postopératoires et post-traumatiques.



### DM Classe I

### Non remboursé

Tour de buste sous la poitrine (cm)	50-75	> 75
Taille	1	2
Coloris ■	4056649685760	4056649685869
Réf.	137480	137481

Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

COMFORT

## Epi

Velpeau® Epi Comfort est un bandage assurant une compression sur l'articulation du coude et sur les unités tendino-musculaires proches de l'articulation. La sangle amovible accentue l'effet de compression en cas de besoin et peut être ajustée si nécessaire.

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement des douleurs aiguës ou chroniques en cas de défaillances fonctionnelles suite à une charge mal placée ou à une surcharge des muscles extenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras avec irritations du tendon (tendinose) :

- Epicondylite radiale (tennis elbow).
- Epitrochléite médiale (tendinite du golfeur).



### DM Classe I

Non remboursé

Tour d'avant-bras (cm)	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	30-33
Taille	0	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649516330	4056649516354	4056649516378	4056649516392	4056649516415	4056649516439
Réf.	34033	34034	34035	34036	34037	34038



Pour en savoir plus  
[www.Velpeau.fr](http://www.Velpeau.fr)

COMFORT

## Bandage anti-épicondylite

**Indications :** Epicondylites, en curatif et en préventif (travail et sport : tennis elbow, golf elbow...).

### DM Classe I

Non remboursé

Taille unique	1
Coloris ■	4056649518754
Réf.	82480





Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpau.fr**

## ORTHÈSES POIGNET/MAIN/POUCE

Manus Comfort	Manu Control Comfort	Manu Control Classic
		
Tendinopathie Arthrose	Tendinopathie Arthrose	Entorses Canal Carpien
Rhizo Classic	Rhizocast Classic	Rhiza Pro Comfort
		
Rhizarthrose Entorses	Entorses Tendinopathie	Rhizarthrose

### L'articulation du poignet :

L'articulation du poignet est une articulation complexe indissociable sur le plan fonction des autres articulations du membre supérieur, épaule, coude, avant-bras et de la main.

Le poignet est très exposé aux traumatismes, au surmenage articulaire sportif ou professionnel, aux différentes pathologies rhumatismales, arthrose, arthrite inflammatoire et métabolique, tendinopathies diverses.\*

\* L'observatoire du mouvement 2007.

## La prise de mesure

La prise de mesure est une étape importante pour choisir la taille d'orthèse adéquate selon sa morphologie. Mesurez la circonférence du poignet puis reportez-vous au tableau de mesure pour voir les correspondances de taille.



## La mise en place<sup>1</sup>

Nos orthèses de poignet-main-pouce sont toutes munies de fermetures auto-agrippantes, d'une baleine amovible en aluminium ou de plaque thermoformable.


Ouvrez l'ensemble du produit de façon à obtenir une ouverture maximale. Pour éviter que les fermetures auto-agrippantes glissent et sortent des boucles, faites passer toute la fermeture auto-agrippante de la sangle supérieure par la boucle supérieure.

Glissez le poignet concerné dans l'orthèse en plaçant le pouce dans l'orifice réservé à cet effet et assurez-vous que l'orthèse et les sangles sont bien positionnées et corrigez la pression exercée sur le poignet en tirant plus ou moins fort.

Pour une immobilisation adaptée, pensez à bien ajuster les baleines ou plaques thermoformables pour éviter les points d'appuis et zones d'inconfort.

1

### Voici quelques conseils pour vos patients ayant une arthrose DÉBUTANTE des doigts et du poignet.<sup>2</sup>

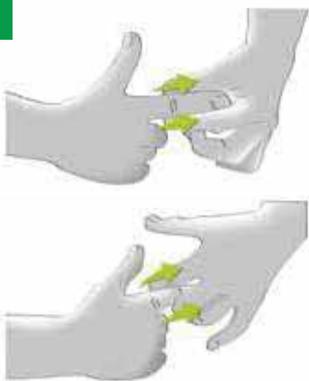


1 AUTOMASSAGES



2 ÉTIREMENT DES POUCES




3 ÉTIREMENT DES DOIGTS

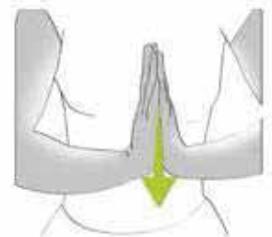

4 ÉTIREMENT DOIGTS ET POIGNETS

2


### Voici quelques conseils pour vos patients ayant une arthrose INSTALLÉE des doigts et du poignet.<sup>3</sup>

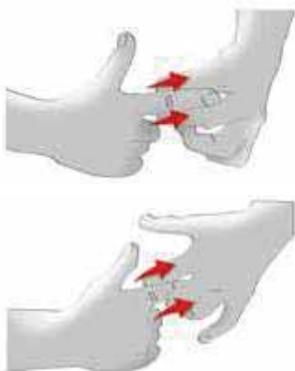

1 AUTOMASSAGES



2 OUVERTURE DU POUCE

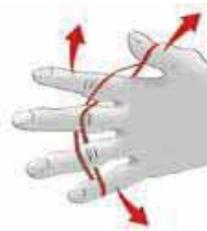

3 RENFORCEMENT DES DOIGTS



4 FLEXION DORSALE DE LA MAIN

1 : Notices d'utilisations : Manus Comfort, Manu Control Comfort, Manu Control Classic, Rhizo Classic, Rhiza pro Comfort, Rhizocast Classic.

2 : Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose débutante, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409102 – Septembre 2014. Edition scientifiques L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com

3 : Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose installée, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409103 – Septembre 2014. Edition scientifiques L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com

COMFORT

## Manus

Velpeau® Manus Comfort comprime grâce à la combinaison du tricot, de l'insert en silicone en demi-lune et de la sangle de stabilisation au niveau du poignet et réduit ainsi la tendance au gonflement. Le poignet est stabilisé grâce à la baleine anatomique amovible et la sangle de stabilisation. Si la baleine est enlevée, la fonction principale de l'orthèse de poignet sera de comprimer et stabiliser grâce à la sangle de stabilisation.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation 2 : DF-2018-049. 3- DFC-2020-066.

**Indications :** Traitement post-traumatique des entorses modérées à graves. Arthrose activée ou arthrite du poignet. Tendinite au niveau de la main. Tendovaginite (tendinite du poignet). Traitement ultérieur suite à des fractures du poignet, des opérations ou la pose d'un plâtre. Algoneurodystrophie de stade I (SRDC). En cas d'instabilité et de surcharge fonctionnelle au niveau du poignet.



Baleine anatomique amovible.<sup>1</sup>



Compression supplémentaire grâce à la sangle circulaire.<sup>3</sup>



Confortable grâce aux microfibres.<sup>2</sup>


### DM Classe I

Code LPP : 7121824

41,64€

LPP

Tour de poignet (cm)	13-14,5	14,5-16,5	16,5-19	19-23
Taille	0	1	2	3
Droite ■	4056649516958	4056649516972	4056649516996	4056649517016
Réf.	34484	34485	34486	34487
Gauche ■	4056649517030	4056649517054	4056649517078	4056649517092
Réf.	34518	34519	34520	34521

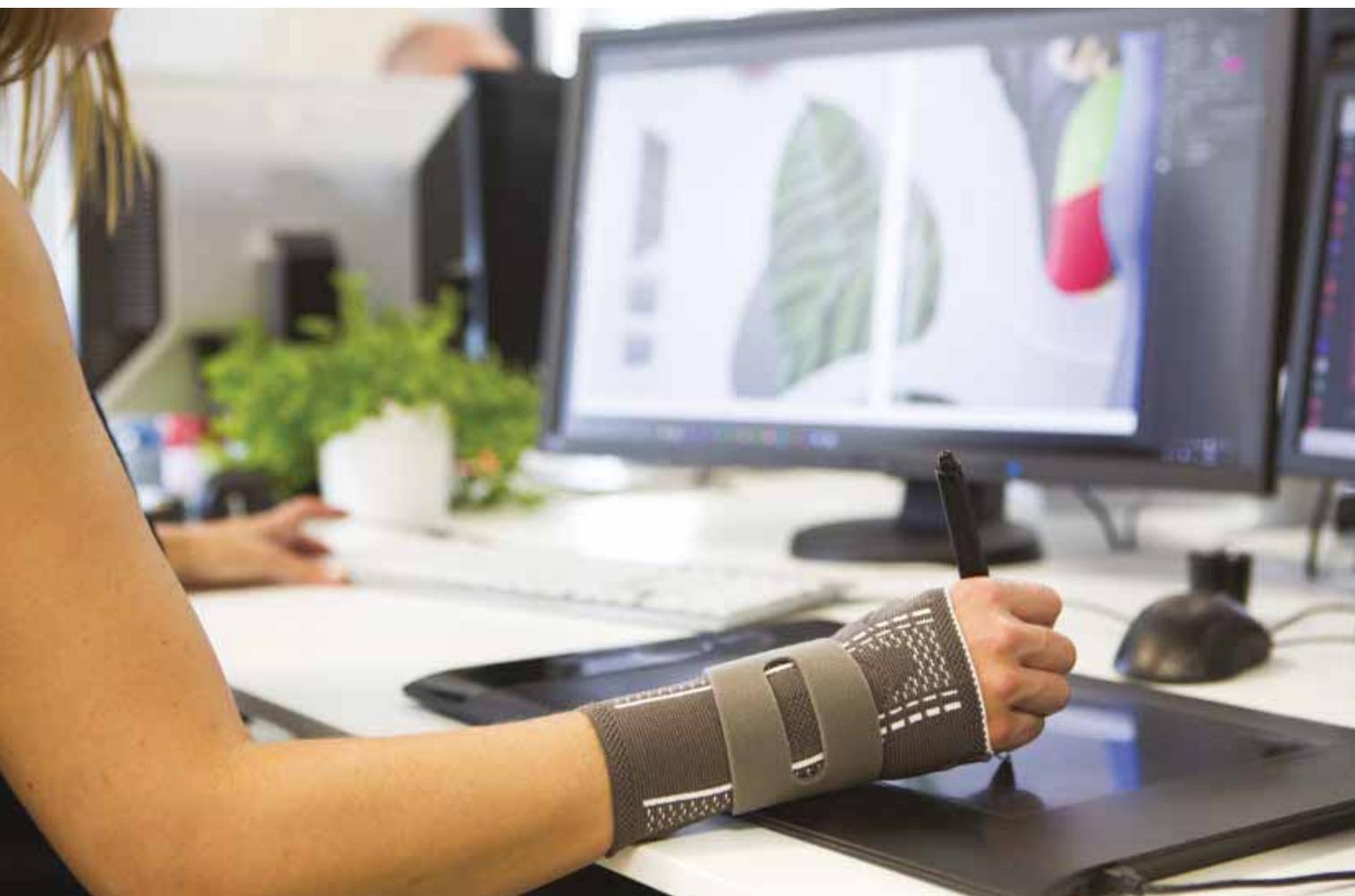

## VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS PRÉSENTANT UN TMS\*\* OU EN REPRISE D'ACTIVITÉ<sup>1</sup>

Améliorez votre mobilité articulaire par des mouvements d'**étirements statiques** et de **relaxation**. Les mouvements sont à faire quotidiennement (l'exercice dure 2 à 3 minutes).



\*\*TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

<sup>1</sup> : Isel M, Merle M. Orthèses de la main et du poignet – Protocoles de rééducation. 2012. Edition : Elsevier Masson. Chapitre 13 – Rééducation musculaire. Page 201.

COMFORT

## Manu Control **NOUVEAU**

Velpeau® Manu Control Comfort est une orthèse pour le poignet. La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-073. 3 : DFC-2020-077. 4 : DFC-2020-074.

**Indications :** Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la main (tendinite). Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre. Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I. Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite).



### DM Classe I

Code LPP : 7121669

56,<sup>64</sup>€ **LPP**

Tour de poignet (cm)	13-16.5	15.5-19.5	18.5-22.5	21.5-26
Taille	1	2	3	4
Droite ■	4063591106311	4063591106335	4063591106359	4063591153643
Réf.	190292	190293	190294	190428
Gauche ■	4063591106014	4063591106038	4063591106052	4063591153667
Réf.	190289	190290	190291	190429

CLASSIC

# Manu Control

Velpeau® Manu Control Classic est une orthèse pour le poignet. La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le poignet droit ou gauche.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DF-2017-053. 3 : DF-2017-054. 4 : DF-2017-055.

**Indications :** Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la main (tendinite). Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite). Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I. Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre. Syndrome initial du canal carpien. Instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet.

Évidement du pouce doux et confortable.<sup>2</sup>

Facile à utiliser.<sup>4</sup>

Design réversible innovant.<sup>3</sup>

Ambidextre.

## DM Classe I

Code LPP : 7121669

56,<sup>64</sup>€

LPP

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	4063591415444	4063591415451	4063591415468
Réf.	108880	108881	108882

CLASSIC

## Rhizo

Velpeau® Rhizo Classic est une orthèse de pouce. Une baleine anatomiquement préformée et deux sangles de stabilisation immobilisent l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce en réduisant la mobilité. La baleine peut être adaptée individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le pouce droit ou gauche.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur). Immobilisation en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce. Immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).



DM Classe I

Code LPP : 7122114

43,32€ LPP

Tour de poignet (cm)	12,5-17,5	16,5-21,5
Taille	1	2
Coloris ■	4056649777144	4056649777274
Réf.	190040	190041

CLASSIC

## Rhizocast

Velpeau® Rhizocast Classic est une orthèse pour le poignet et le pouce. La combinaison d'une baleine palmaire, d'une baleine latérale, et de deux baleines pour le pouce, ainsi que de quatre sangles de stabilisation entraîne une immobilisation du poignet, de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, ainsi qu'en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur). Immobilisation en cas d'altérations dégénératives au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose). Immobilisation en cas d'inflammations de l'appareil tendineux de la main (tendovaginite). Immobilisation en cas de syndrome du canal carpien initial (SCC).



DM Classe I

Code LPP : 7122083

53,18€ LPP

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Droite ■	4056649777311	4056649777434	4056649777656
Réf.	190050	190052	190054
Gauche ■	4056649777359	4056649777496	4056649777748
Réf.	190051	190053	190055

COMFORT

## Rhiza Pro

Velpeau® Rhiza Pro est une orthèse de pouce. Tricot 3D, intérieur coton. Légère et peu encombrante. Plaque thermoformable. Pince pouce / index conservée. Ambidextre.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur), en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce, en cas d'altération dégénérative dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).



DM Classe I

Code LPP : 7122083

53,18€

LPP

Tour de poignet (cm)	14-17	17-21	21-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649514671	4056649514695	4056649519966
Réf.	18894	18898	18909

COMFORT

## Poignet de contention réglable

**Indications :** Séquelles de traumatisme, sport, maintien du poignet lors d'efforts



DM Classe I

Non remboursé

Tour de poignet (cm)	< 17	> 17
Taille	1	2
Coloris □	4056649518372	4056649518396
Réf.	82308	82309

# ORTHÈSES

## Membres inférieurs



Retrouvez  
nos vidéos sur  
**Velpeau.fr**

### ORTHÈSES GENOU

Anatomique Classic	Genu Comfort	Laxitéral Comfort	Ligaction Comfort
			
Syndromes douloureux	Pathologies rotuliennes	Pathologies rotuliennes	Pathologies ligamentaires
Ligaction City Comfort	Ligaction Pro Comfort	Xpro Classic	Genucast Classic 0° / 20° / Modular
			
Pathologies rotuliennes Pathologies ligamentaires	Pathologies ligamentaires	Pathologies ligamentaires Immobilisation réglable	Immobilisation

#### L'articulation du genou :

Articulation intermédiaire du membre inférieur, rôle statique et dynamique important, elle est formée de deux ensembles fémoro-tibial et fémoro-patellaire.

Le système ligamentaire est complexe et fragile avec des structures périphériques internes, externes et axiales. Les ménisques fixés au tibia ont un rôle à la fois de stabilisation et d'amortissement et de répartition des charges.\*

\* L'observatoire du mouvement 2007.

# 4 conseils pour préserver vos genoux



## 1 JE MÉNAGE MES GENOUX

### En adoptant les bons réflexes :

- Monter les escaliers en gardant le dos droit et en appuyant sur toute la surface du pied (et pas seulement l'avant),
- Fléchir les genoux dans l'axe des pieds en gardant les talons au sol pour se baisser.
- Pour se tourner sur le côté, on pivote toujours les genoux en même temps que les pieds.

### En corrigeant ma posture :

Des genoux qui tournent vers l'intérieur ou l'extérieur, une voûte plantaire qui s'affaisse, peuvent, à la longue, user les cartilages. Si besoin, prendre **rendez-vous chez un podologue** qui pourra confectionner des semelles correctrices.

### En gardant un poids de forme :

1 kg en trop représente une force de 3 à 4 kg supplémentaires sur chaque genou lorsqu'on marche.

## 2 J'ENTRETIENS LEUR MOBILITÉ

**Chaque matin, allongé dans son lit**, on les déroule en douceur pendant quelques minutes :

- D'abord avec des flexions et extensions dans l'axe du corps en faisant glisser le pied sur le lit.
- Puis, jambe fléchie on effectue des rotations du genou et de la cheville, en faisant pivoter le talon sur le lit, vers la droite, puis la gauche.

### Régulièrement, on étire les muscles des jambes.

Plus souples, ils seront moins contraignants pour l'articulation et limiteront **l'usure du cartilage**.

**Penser aussi à travailler son équilibre** pour renforcer ses capteurs proprioceptifs (qui permettent de stabiliser le corps et limitent les risques de blessures) : debout, on fléchit une jambe et on garde l'équilibre pendant 30 sec à 1 min. Si c'est trop facile, on fait l'exercice sur un coussin.

## 3 JE RENFORCE MES GENOUX

Nos genoux sont maintenus par des ligaments mais aussi par des muscles. Plus ils sont toniques, plus l'articulation est stable. Les exercices recommandés sont simples et à la portée de tous : fentes, squats, extensions arrière des jambes avec élastique...

### Hyper efficace pour tonifier les cuisses :

L'exercice de la chaise : dos au mur on fléchit les genoux pour que les cuisses soient parallèles au sol et on tient le plus longtemps possible.

On prend toujours les escaliers, une bonne habitude permettant de muscler à la fois les jambes et les fesses.

## 4 JE FAIS DU SPORT (RAISONNABLEMENT)

Même si on a des genoux fragiles, il est indispensable de bouger pour préserver la bonne santé de ses articulations. Dans ce cas, les sports à privilégier sont la **natation** (sauf la brasse) la marche et le vélo (sur terrain plat de préférence) et toutes les activités douces comme l'aquagym, le yoga, le pilate...

Si on pratique un sport d'impact (**running**, tennis...), on ajoute régulièrement à ses séances du renforcement musculaire et des étirements de tout le corps. Ainsi, on ne sollicite pas toujours les mêmes muscles.

COMFORT

## Genouillère articulaire

Orthèse pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement de douleurs chroniques ou aiguës et/ou des irritations articulaires du genou :

- Entorses légères du genou.
- Début de gonarthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire.



DM Classe I

Code LPP : 201D00.5

7,<sup>39</sup>€ LPP\*

Tour de genou (cm)	24-28	28-32	32-37	37-42	42-48
Taille	1	2	3	4	5
Coloris □	4056649517511	4056649517573	4056649517597	4056649517610	4056649517634
Réf.	82051	82052	82053	82054	82055

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

## Genouillère anatomique

Orthèse pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement de douleurs chroniques ou aiguës et/ou des irritations articulaires du genou :

- Entorses légères du genou.
- Début de gonarthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire.



DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2

19,<sup>30</sup>€ LPP\*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649514718	4056649514732	4056649514756	4056649514770	4056649515333
Réf.	19377	19378	19379	19383	25807

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



**COMFORT**  
**Genu**

Orthèse pour le soutien et la stabilisation de l'articulation du genou. Velpeau® Genu Comfort est une genouillère avec insert et baleines latérales pour la compression et la stabilisation de l'articulation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-067. 3 : DFC-2020-068.

**Indications :** Traitement de douleurs chroniques et aiguës et des irritations articulaires ainsi que les déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale et suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et des ligaments :

- Entorses du genou légères ou modérées.
- Début de gonarthrose ou arthrose avec et sans épanchement articulaire.
- Instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère.
- Syndrome rotulien combiné avec une thérapie fonctionnelle.
- Pathologies du ménisque latéral ou médial légères et pour le traitement postopératoire après chirurgie du ménisque.
- Instabilité rotulienne.



Pour en savoir plus  
[www.Velpeau.fr](http://www.Velpeau.fr)

**DM Classe I**

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

**24,<sup>46</sup>€** LPP\*

Tour de genou (cm)	25-29	29-33	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53
Taille	0	1	2	3	4	5	6
Coloris ■	4056649516811	4056649516835	4056649516859	4056649516873	4056649516897	4056649516910	4056649516934
Réf.	34290	34291	34292	34293	34294	34295	34296

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

## Laxitéral®

Velpeau® Laxitéral® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-057.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



Baleines latérales flexibles.<sup>2</sup>

### DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,<sup>46</sup>€

LPP\*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649514534	4056649514558	4056649514572	4056649514596	4056649515432
Réf.	17851	17852	17853	17854	25815

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

## Ligaction®

Velpeau® Ligaction® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-058.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



Baleines articulées double axe.<sup>2</sup>

### DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,<sup>46</sup>€

LPP\*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649517351	4056649517375	4056649517399	4056649517412	4056649515395
Réf.	82031	82032	82033	82034	25813
Coloris ■	4056649514015	4056649514039	4056649514053	4056649514077	4056649515371
Réf.	17445	17446	17447	17448	25809

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

# Ligation® City

Velpeau® Ligation® City Comfort est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-048. 3 : DFC-2021-049. 4 : DFC-2021-050.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

MODÈLE  
BREVETÉ



Symétrique  
(Utilisation droite  
ou gauche).<sup>2</sup>

Elasticité  
double sens.<sup>4</sup>

Creux poplité  
dégagé.<sup>1</sup>

2 baleines amovibles  
(pour un soutien évolutif,  
articulées et souples).<sup>3</sup>

Système de  
fermeture  
ajustable.<sup>3</sup>

Strapping  
amovible.<sup>1</sup>

DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,<sup>29</sup>€

LPP

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649515876	4056649515890	4056649515913	4056649515937
Réf.	32930	32931	32933	32934

Retrouvez  
nos vidéos sur  
[Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

COMFORT

# Ligaction® Pro

## La première genouillère Velpeau® ouverte

Velpeau® Ligaction® Pro Comfort est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-052. 3 : DFC-2021-053. 4 : DFC-2021-085.

**Indications :** Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



### DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,<sup>29</sup>€

LPP

Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48	47-52
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56	56-65
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649515470	4056649515494	4056649515517	4056649515531	4056649515555
Réf.	30860	30861	30862	30863	30864

 Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

CLASSIC  
**Xpro**

Velpeau® Xpro Classic est une orthèse ouverte d'immobilisation ou de limitation de la flexion / extension du genou avec fermeture et réglage par quatre sangles semi-circulaire.<sup>1</sup>

Les articulations monocentriques comportent un secteur de mobilité articulaire réglable.<sup>1</sup>

Flexion et extension réglables tous les 10°<sup>1</sup> :

- de 0° à 120° en flexion
- de -10° à 60° en extension

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Traitement post-traumatique des lésions du genou (lésion ligamentaire, méniscale et ostéocondrale). Traitement postopératoire après une chirurgie du genou (chirurgie ligamentaire, méniscale et ostéocondrale).

**DM Classe I**

Code LPP : 7121764

102,<sup>29</sup>€

LPP

Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649517658	4056649517672	4056649517696	4056649517719
Réf.	82067	82068	82069	82070

Renfort semi-rigide postérieur (ischio-jambiers).

Creux poplité dégagé.



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

Adaptable à la morphologie et à la pathologie du sujet.<sup>1</sup>



CLASSIC

**Genucast**

Orthèse de genou en position à 0°. Velpeau® Genucast 0° Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.<sup>1</sup>

Orthèse de genou en position à 20°. Velpeau® Genucast 20° Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.<sup>1</sup>

Orthèse à 3 panneaux pour le genou. Velpeau® Genucast Modular Classic est une orthèse d'immobilisation du genou en trois parties. Elle est composée d'une partie principale et deux parties latérales. La conception du produit en trois parties permet un ajustement personnalisé à la circonférence de la jambe. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Immobilisation temporaire de l'articulation du genou après des blessures/ opérations.

**DM Classe I**

Code LPP : 7121770

57,<sup>23</sup>€

LPP

Tour de mollet (cm)	24-28	28-32	32-40	40-48
Tour de cuisse (cm)	30-38	38-46	46-54	54-68
Taille	1	2	3	4
<b>Genucast 0°</b>				
Coloris ■	4056649686309	4056649686323	4056649686347	4056649686361
Réf.	137515	137516	137517	137518
<b>Genucast 20°</b>				
Coloris ■	4056649686385	4056649686408	4056649686422	4056649686446
Réf.	137520	137521	137522	137523

Taille du patient (cm)	< 160	160-180	> 180
Hauteur (cm)	45	55	65
Taille	1	2	3

<b>Genucast Modular</b>				
Coloris ■	4056649686460	4056649686484	4056649686507	
Réf.	137525	137526	137527	



# ORTHÈSES CHEVILLE

Retrouvez  
nos vidéos sur  
[Velpau.fr](http://Velpau.fr)

**NOUVEAU**

Ankle Control Expert



Entorse Grade 1-2  
Prévention secondaire



Articulaire Comfort



Arthrose/ Arthrite

Anatomique Classic



Syndrome douloureux

Ligation Classic



Entorse grade 1

Laxité latérale Comfort



Tendinopathie

Freecast Adjust Classic



Entorse grade 2

Freecast Comfort



Entorse grade 2

Airstep Walker Classic



Entorse grade 3

## L'articulation de la cheville :

L'articulation talo-crurale est une structure articulaire complexe et fragile. Elle permet d'orienter le pied dans le plan sagittal (flexion dorsale et plantaire).

Les structures ligamentaires externes et internes très exposées sont renforcées par de puissants tendons.\*

\* L'observatoire du mouvement, 2007.

# EN PRATIQUE

## Entorse de cheville

2 millions de cas par an.<sup>1</sup>  
6 000 consultations/ jour pour une entorse de la cheville.<sup>1</sup>

## Soins aux patients

Le nombre de diagnostics en cabinet de ville est estimé à 950 000/an en France.<sup>2</sup>

## Orthèses vs plâtres

80 à 85% des entorses pourraient être traitées par immobilisation grâce à une orthèse stabilisatrice.<sup>2</sup>

## Arthrose

L'arthrose concerne 3% des moins de 45 ans, 65% des plus de 65 ans et 80% des plus de 80 ans.<sup>3</sup>

## Urgence hospitalière

7 à 10% des urgences hospitalières concernent une entorse de cheville.<sup>1</sup>

## Prévention et récupération

15 à 60% des athlètes qui ont subi une entorse de la cheville développent une instabilité fonctionnelle.<sup>4</sup>



### PRISE DE MESURE

- Prenez les mesures du tour de la cheville au-dessus de la malléole à l'aide d'un mètre souple.
- Suivez le guide des tailles pour savoir à quelles mesures correspond chaque taille. Si la mesure prise est entre deux tailles, optez pour la taille la plus petite pour ajuster la chevillère correctement et garantir son efficacité.



### MISE EN PLACE<sup>5</sup>

- Mettez vous en position assise et posez votre pied pour que l'articulation de la cheville forme un angle de 90°.
- Enfilez la chevillère pour que la couture soit centrée sur le dessus du pied ou placez l'orthèse rigide autour du pied en ajustant les coques pour placer la malléole dans les creux prévus à cet effet.
- Ajustez les sangles auto-agrippantes en réalisant un croisement en 8 ou tirez sur les systèmes de fermeture, tout en vous assurant que la cheville est bien positionnée et immobilisée.
- Corrigez la pression exercée sur la cheville en tirant plus ou moins fort sur les sangles ou les systèmes de fermeture.
- Assurez vous que les sangles ne présentent pas de plis pour le confort de port.

1. Haute Autorité de Santé. A2T. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2018. consulté le 01/02/2021. 2. Haute Autorité de Santé. ORTHESES STABILISATRICES DE CHEVILLE. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2002. consulté le 01/02/2021. 3. <https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose> consulté le 01/02/2021 consulté le 01/02/2021. 4. BARDOT-BRARD, Nicolas, (2014). Instabilité fonctionnelle de cheville et programme d'auto-rééducation. Rennes : Institut de Formation en Masso Kinésithérapie de Rennes, pp. 5-6 consulté le 01/02/2021. 5. Notices d'utilisation : Chevillère anatomique, Laxitéral, Ligaction, Freecast Comfort, Freecast Adjust, Airstep Walker consulté le 01/02/2021.

COMFORT

## Chevillère articulaire

Orthèse élastique pour la compression et la stabilisation de la cheville<sup>1</sup>, de forme anatomique.<sup>2</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-015.

**Indications :**

- Douleurs aiguës et chroniques de l'articulation de la cheville.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.



DM Classe I

Code LPP : 201D01.12

6,78€

LPP\*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris <input type="checkbox"/>	4056649519010	4056649519034	4056649519058	4056649519072
Réf.	82721	82739	82740	82746

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

## Chevillère anatomique

Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur<sup>2</sup> pour la compression et la stabilisation de la cheville, Structure tricotée 3D<sup>3</sup>. Talon fermé.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-016. 3 : DFC-2021-017.

**Indications :**

- Douleurs aiguës et chroniques de l'articulation de la cheville.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.



DM Classe I

Code LPP : 201D02.6

16,19€

LPP\*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris <input type="checkbox"/>	4056649513933	4056649513957	4056649513971	4056649513995
Réf.	17432	17433	17434	17435

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

## Ligaction®

Velpeau® Ligaction® Classic est une orthèse pour la compression et la stabilisation de la cheville, avec une structure tricotée 3D<sup>1</sup> et sangles additionnelles élastiques<sup>3</sup>. Talon fermé.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-014. 3 : DFC-2021-086.

### Indications :

- Douleurs aiguës et chroniques de la cheville.
- Lésions ligamentaires de l'articulation tibio-tarsienne, stade 1.
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Hypermobilité locale modérée.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra articulaire.



### DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

18,77€ LPP\*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649514794	4056649514817	4056649514831	4056649514855
Réf.	19387	19388	19389	19394

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT

## Laxitéral®

Velpeau® Laxitéral® Comfort est une orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur. Silicone rétro malléolaire et achilléen avec une surface interne spécifique, favorisant la résorption de l'oedème. Elasticité tous sens (forte extensibilité pour faciliter l'enfilage). Structure double face brevetée pour favoriser le transfert d'humidité. Talon fermé.<sup>1</sup>

1 : Etiquetage.

### Indications :

- Lésions traumatiques, dégénératives ou inflammatoires
- Œdèmes de la cheville.



Surface favorisant la résorption de l'oedème<sup>1</sup>



### DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

18,77€ LPP\*

Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649514237	4056649514251	4056649514275	4056649514299
Réf.	17844	17845	17846	17847

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

EXPERT

# Ankle Control **NOUVEAU**

Velpeau® Ankle Control Expert est une orthèse stabilisatrice de cheville. L'association d'un support tricoté, de deux coques rigides et d'une sangle au milieu du pied stabilise les articulations de la cheville. Velpeau® Ankle Control Expert peut être réglé avec le système Quick Adjust. Le dispositif se porte à la cheville droite ou gauche.<sup>7</sup>

1 : DFC-2021-061. 2 : DFC-2021-076. 3 : DFC-2021-063. 4 : DFC-2021-066. 5 : DFC-2021-067. 6 : DFC-2021-087. 7 : Notice d'utilisation.

**Indications :** Blessures du ligament latéral et médial (post-traumatique, postopératoire), entorse de grade I et II, instabilité ligamentaire chronique, hypermobilité localisée ou générale, arthrite rhumatoïde/Ostéoarthrose activée, prévention des blessures récurrentes de la cheville en cas de faiblesse.



DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,44€

LPP\*

Circonférence talon - cou-de-pied	28-34	33-38
Taille	1	2
Coloris ■	4063591190761	4063591190792
Réf.	190435	190436

\* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.



Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

## Découvrez nos outils de formation et de sell-out\* :

- Brochure aide à la délivrance
- Fiches patients
- Pied de démonstration



\*actions d'animation commerciales

CLASSIC

# Freecast® Adjust

Velpeau® Freecast® Adjust Classic est une orthèse pour la stabilisation de la cheville.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-051

## Indications :

- Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Arthrose activée, arthrite.
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire.

Prévient des faux-mouvements en supination et en pronation.<sup>2</sup>

Taille unique pour la cheville droite et gauche.



Coques de forme anatomique.



Zone malléolaire souple.



DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,44€

LPP\*

Pointure	35-45
Taille	Standard
Coloris ■	4056649516316
Réf.	34007

\* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

COMFORT

## Freecast®

Velpeau® Freecast® Comfort est une orthèse pour la stabilisation de la cheville. Les deux coques dures de forme anatomique munies de rembourrages intérieurs sont reliées l'une à l'autre par talonnette. L'orthèse est fixée à la jambe à l'aide de trois sangles réglables.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-045. 3 : DFC-2019-046. 4 : DFC-2019-050. 5 : DFC-2019-049.

### Indications :

- Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Arthrose activée, arthrite.
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire.

Trois sangles pour une fixation adaptée.<sup>4</sup>



Sangle de talon adaptable pendant le port de l'orthèse.<sup>4</sup>



L'aide à l'application sur le produit soutient une application correcte.<sup>5</sup>

Coques conçues d'ailettes souples pour un bon ajustement.<sup>3</sup>



Coussin de rembourrage doux et confortable.<sup>2</sup>

### DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,<sup>44</sup>€

LPP\*

Taille du patient (cm)	< 160	> 160
Taille	1	2
<b>droite</b>		
Coloris ■	4056649874607	4056649874645
Réf.	190004	190006
<b>gauche</b>		
Coloris ■	4056649874621	4056649874669
Réf.	190005	190007

\* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.



CLASSIC

## Airstep® Walker

Airstep® Walker Classic est une botte de marche en deux parties avec des coussins d'air gonflables. Elle se compose d'un complexe textile respirant, une coque en plastique rigide, une protection antérieure en plastique et un système de réglage circulaire par auto agrippant. Le volume des coussins d'air peut être augmenté en pressant les pompes ou diminué en appuyant sur les valves de décompression. Le gonflage des coussins d'air a pour but d'apporter un maintien / une compression / une immobilisation supplémentaire de la cheville. La forme de la semelle est conçue pour aider à la marche tout en gardant la cheville immobilisée. Protection d'orteils réglable.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

### Indications :

- Traitement d'entorses de cheville (grades 2 et 3).
- Fractures stables, stabilisation en postopératoire.
- Traumatisme et rééducation.



### DM Classe I

Code LPP : 7121818

64,<sup>40</sup>€

LPP\*

Pointure	35-38	39-43	44-46
Taille	S	M	L
Coloris ■	4056649519157	4056649519171	4056649519195
Réf.	106240	106241	106243

\* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

# VeinoCare®



*Et vous quel sportif  
du quotidien êtes vous ?*

Découvrez-le bientôt à travers  
nos nouvelles couleurs.

# Prise de mesures


## Nos conseils pour une compression efficace.

Velpeau® VeinoCare® Microfibre  
 Velpeau® VeinoCare® Coton  
 Velpeau® VeinoCare® Ultra

Taille	S Taille 1	M Taille 2	L Taille 3	XL Taille 4	XXL Taille 5
Cheville B	18-21	21-24	24-27	27-30	30-33
Mollet C	31-34	34-37	37-40	40-48	43-51
Cuisse G	48-57	52-62	56-67	56-69	62-75

Les collants microfibre sont uniquement disponibles de la taille S à la taille L.

Mesures en cm	Hauteur	Normal	Long
	AD	≤ 39	> 39
	AG	≤ 75	> 75

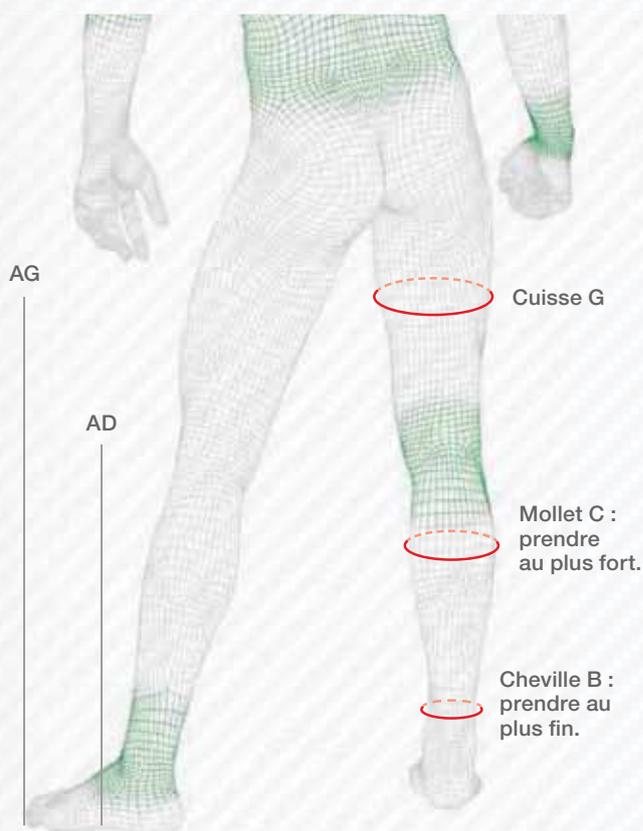

## Velpeau® VeinoCare® Homme

Taille	S Taille 1	M Taille 2	L Taille 3	XL Taille 4	XXL Taille 5
Cheville B	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
Mollet C	32-35	35-38	38-41	41-44	44-47

## Velpeau® VeinoCare® City 3

Taille	S Taille 1	M Taille 2	L Taille 3	XL Taille 4
Cheville B	18-21	21-24	24-27	27-30
Mollet C	31-34	34-37	37-40	40-43



1. Introduisez une main à l'intérieur du bas et pincez le talon
2. Retournez le produit jusqu'à hauteur du talon
3. Introduisez le pied dans le bas jusqu'à ce que le talon soit parfaitement mis en place
4. Faites glisser le bas soigneusement sur votre cheville et votre jambe
5. Massez votre jambe pour répartir uniformément le bas
6. Le produit est en place

## Nos conseils d'enfilage et entretien<sup>1</sup>

- Préférez la prise de mesure le matin
- Attention aux variations morphologiques (grossesse, prise ou perte de poids ...); pensez à réitérer la prise de mesure
- Lors de l'enfilage, ne pas tirer sur le bas et prenez garde aux ongles cassés, bijoux ...
- Ne pas repriser les bas afin de ne pas altérer leur efficacité
- Lavage en machine à 30° en cycle délicat<sup>1</sup>
- Lavable jusqu'à 90 fois<sup>1</sup>
- Ne pas mettre au sèche-linge ou sur une source de chaleur<sup>1</sup>
- Ne pas repasser ni nettoyer à sec<sup>1</sup>

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

PROBLÈMES DE  
CIRCULATION  
VEINEUSE

**FAITES LE  
BON  
CHOIX**

« **Les Essentiels** » la gamme de compression Velpeau®  
VeinoCare® pour le bien-être de vos patients au quotidien.

MARCHÉ  
ACTUEL

**12**  
millions

Nombre de paires de  
bas de compression  
en France

MARCHÉ  
POTENTIEL

**36**  
millions

**18**

millions

de personnes en  
France souffrent  
d'insuffisance  
veineuse

Stock  
**RÉDUIT**

Moins de 200 références

Gamme  
**OPTIMISÉE**


Délivrance  
**RAPIDE**

**Prise de mesure facilitée**  
avec un taillage et des coloris bien pensés.

# Augmenter votre sell-out<sup>1</sup> !

Poster équipe officinale

Vidéo

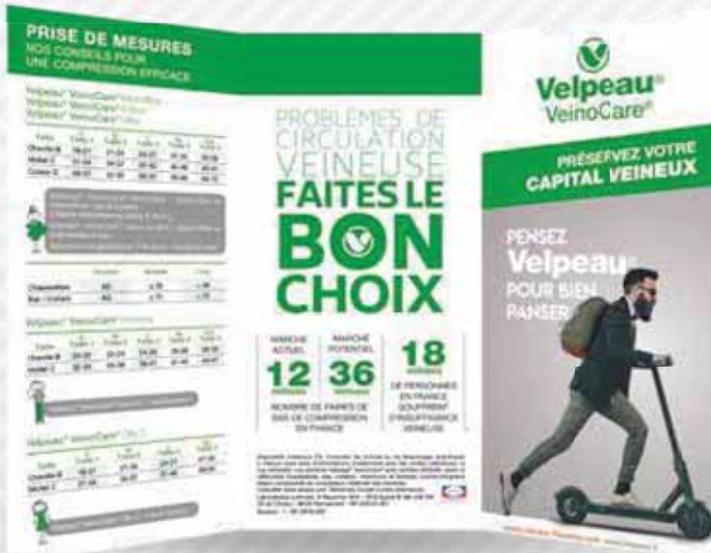

Dépliant patient et présentoir



PLV<sup>2</sup>

Éventail de présentation



1) vente  
2) Publicité sur le lieu de vente

# Compression

## Velpeau® VeinoCare®

Indications Velpeau® VeinoCare® - Gammes Ultra, Homme, Microfibre et Coton

Classe de compression 2 – 15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, varices de plus de 3 mm, varices de grosseur (à l'exception de la gamme Velpeau® VeinoCare® Homme), voyages durant plus de 2 heures, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout.

**Contre-indications :** Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, micro-angiopathie diabétique avancée (pour une pression > 30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, allergie connue et/ou hyper-sensibilité à l'un des composants, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte). Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée. Celle-ci doit être recouverte au préalable par un pansement adapté.

Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être réalisée en cas de :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.
- Neuropathie périphérique avancée.
- Dermatose suintante ou eczématisée.
- Intolérance aux fibres utilisées.



## Velpeau® VeinoCare® Ultra

### Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190311	4063591109831	190304	4063591109633	190317	4063591110073
	Long	190312	4063591109893	190305	4063591109657	190318	4063591110172
Taille 2 - M	Normal	190313	4063591109954	190306	4063591109671	190319	4063591111711
	Long	190314	4063591110011	190307	4063591109695	190320	4063591111773
Taille 3 - L	Normal	190315	4063591110035	190308	4063591109794	190321	4063591111834
	Long	190316	4063591110059	190309	4063591109817	190322	4063591111858
Taille 4 - XL	Normal	190331	4063591115559	190335	4063591115917	190339	4063591115993
	Long	190332	4063591115733	190336	4063591115931	190340	4063591116013
Taille 5 - XXL	Normal	190333	4063591115870	190337	4063591115955	190341	4063591116037
	Long	190334	4063591115894	190338	4063591115979	190342	4063591116174



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190353	4063591117836	190343	4063591117430	190363	4063591118031
	Long	190354	4063591117850	190344	4063591117454	190364	4063591118055
Taille 2 - M	Normal	190355	4063591117874	190345	4063591117478	190365	4063591118079
	Long	190356	4063591117898	190346	4063591117492	190366	4063591118093
Taille 3 - L	Normal	190357	4063591117911	190347	4063591117515	190367	4063591118116
	Long	190358	4063591117935	190348	4063591117539	190368	4063591118130
Taille 4 - XL	Normal	190359	4063591117959	190349	4063591117553	190369	4063591118154
	Long	190360	4063591117973	190350	4063591117577	190370	4063591118291
Taille 5 - XXL	Normal	190361	4063591117997	190351	4063591117591	190371	4063591118314
	Long	190362	4063591118017	190352	4063591117652	190372	4063591118338



\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

# Velpeau® VeinoCare® Homme

## Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP\*



	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
<b>Taille</b>		<b>Gris</b>		<b>Noir</b>		<b>Marine</b>
Taille 1 - S	190373	4063591118352	190383	4063591118994	190378	4063591118536
Taille 2 - M	190374	4063591118413	190384	4063591119014	190379	4063591118550
Taille 3 - L	190375	4063591118437	190385	4063591119038	190380	4063591118574
Taille 4 - XL	190376	4063591118499	190386	4063591119052	190381	4063591118635
Taille 5 - XXL	190377	4063591118512	190387	4063591119076	190382	4063591118857

\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

**OUVREZ L'ŒIL,**  
des nouveautés  
à venir sur  
la gamme  
Homme

CONFORT<sup>2</sup>

EFFICACITÉ<sup>2</sup>

DURABILITÉ<sup>2</sup>

Talon  
Tricot en Y!

Tricotage  
spécifique  
sur le cou-de-pied!

1 : Notice d'utilisation  
2 : DF-2020-002

# Velpeau® VeinoCare® Microfibre

## Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP\*



		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190141	4056649905790	190197	4056649907794
	Long	190142	4056649905851	190198	4056649907817
Taille 2 - M	Normal	190143	4056649905875	190199	4056649907831
	Long	190144	4056649905899	190204	4056649907855
Taille 3 - L	Normal	190145	4056649905912	190205	4056649907879
	Long	190146	4056649905974	190206	4056649907893
Taille 4 - XL	Normal	190392	4063591120119	190388	4063591119410
	Long	190393	4063591120133	190389	4063591119465
Taille 5 - XXL	Normal	190394	4063591120195	190390	4063591119489
	Long	190395	4063591120218	190391	4063591120058

Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190147	4056649905998	190207	4056649907916
	Long	190148	4056649906018	190208	4056649907930
Taille 2 - M	Normal	190149	4056649906032	190209	4056649907954
	Long	190150	4056649906056	190210	4056649907978
Taille 3 - L	Normal	190151	4056649906070	190211	4056649907992
	Long	190152	4056649906094	190212	4056649908012
Taille 4 - XL	Normal	190400	4063591120317	190396	4063591120232
	Long	190401	4063591120379	190397	4063591120256
Taille 5 - XXL	Normal	190402	4063591120393	190398	4063591120270
	Long	190403	4063591120416	190399	4063591120294



Collant Code LPP : 201D04.1, 201D01.8

42,03€ LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190153	4056649906117	190213	4056649908036
	Long	190154	4056649906131	190214	4056649908050
Taille 2 - M	Normal	190155	4056649906155	190215	4056649908074
	Long	190156	4056649906179	190216	4056649908098
Taille 3 - L	Normal	190157	4056649906193	190217	4056649908111
	Long	190158	4056649906216	190218	4056649908135

\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans œdèmes, de lymphoœdème et l'éléphantiasis.



# Velpeau® VeinoCare® Coton

## Classe de compression 2

DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP\*



		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Marine		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190183	4056649907435	190171	4056649907077
	Long	190184	4056649907459	190172	4056649907138
Taille 2 - M	Normal	190185	4056649907473	190173	4056649907152
	Long	190186	4056649907497	190174	4056649907176
Taille 3 - L	Normal	190187	4056649907510	190175	4056649907190
	Long	190188	4056649907572	190176	4056649907213
Taille 4 - XL	Normal	190416	4063591122373	190412	4063591122175
	Long	190417	4063591122557	190413	4063591122199
Taille 5 - XXL	Normal	190418	4063591122694	190414	4063591122212
	Long	190419	4063591122717	190415	4063591122236

Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190189	4056649907596	190177	4056649907237
	Long	190192	4056649907657	190178	4056649907299
Taille 2 - M	Normal	190193	4056649907671	190179	4056649907312
	Long	190194	4056649907695	190180	4056649907336
Taille 3 - L	Normal	190195	4056649907718	190181	4056649907350
	Long	190196	4056649907497	190182	4056649907374
Taille 4 - XL	Normal	190408	4063591121871	190404	4063591121796
	Long	190409	4063591121895	190405	4063591121819
Taille 5 - XXL	Normal	190410	4063591121918	190406	4063591121833
	Long	190411	4063591121932	190407	4063591121857



\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



La plupart des matériaux et colorants utilisés pour la teinture ont reçu le certificat OEKO-TEX.

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.<sup>1</sup>

1 : DF-2019-118

# Velpeau® VeinoCare® City 3

## Classe de compression 3

Classe de compression 3 - 20,1 à 36,0 mmHg / 27.1 à 48.0 hPa

**Indications :** insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout, varices de plus de 3 mm, varices pendant la grossesse, oedème chronique, pigmentation de l'eczéma veineux, ulcère cicatrisé.

**Contre-indications :** Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) <0,6, micro-angiopathie diabétique avancée (pour une pression >30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte), allergie connue et/ou hyper-sensibilité à l'un des composants.



Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être réalisée en cas de :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.
- Neuropathie périphérique avancée.
- Dermatose suintante ou eczémateuse.
- Intolérance aux fibres utilisées.

### DM Classe I

Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP\*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Noir		Gris		Chair	
Taille 1 - S	Normal	190159	4056649906711	190163	4056649906797	190167	4056649906872
Taille 2 - M	Normal	190160	4056649906735	190164	4056649906810	190168	4056649906896
Taille 3 - L	Normal	190161	4056649906759	190165	4056649906834	190169	4056649906919
Taille 4 - XL	Normal	190162	4056649906773	190166	4056649906858	190160	4056649906933

\* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.



Retournez votre catalogue  
et découvrez en page 26  
nos bandes de  
compression Rosidal®.



# Compression Médicale

## Classification CEAP



Les affections veineuses chroniques sont ordonnées selon la classification CEAP. Les principes fondamentaux de la classification CEAP incluent une description de la classe clinique (C) basée sur des signes objectifs, l'étiologie (E), la répartition anatomique (A) des reflux et obstructions dans les veines superficielles, profondes et perforantes et la physiopathologie (P) sous-jacente, qu'elle soit liée aux reflux ou aux obstructions<sup>2</sup>.

Aux premiers stades cliniques de cette classification (C0 et C1), aucune étude ne permet de montrer que la compression veineuse freine l'évolution de l'affection<sup>1</sup>. La compression veineuse est le traitement de base des affections veineuses chroniques à partir du stade C2<sup>1</sup>.

Au regard des recommandations publiées en 2010 par la Haute Autorité de Santé, les Laboratoires Lohmann & Rauscher accompagneront vos patients quel que soit le degré de sévérité de leur affection veineuse.

## La Compression Médicale dans les affections veineuses chroniques.

D'après les recommandations de la HAS<sup>1</sup>

### Indications de la compression médicale

Situation clinique	Dispositifs	Modalités
<b>Varices 3 mm</b> (stade C2)	■ <b>bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg</b>	Traitement au long cours
<b>Après sclérothérapie ou chirurgie des varices</b>	■ <b>bas indiqués pour les varices</b> ■ ou bandes sèches à allongement court	4 à 6 semaines
<b>Œdème chronique</b> (stade C3)	■ <b>bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg</b> ■ ou bandes sèches à allongement court ou long	Traitement au long cours, avec réévaluation régulière du rapport bénéfiques / risques
<b>Pigmentation, eczéma veineux</b> (stade C4a)	■ <b>bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg</b> ■ ou bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b> ■ ou bandes enduites	
<b>Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche</b> (stade C4b)	■ bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ <b>ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade chronique)</b>	
<b>Ulcère cicatrisé</b> (stade C5)	■ <b>bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou &gt; 36 mmHg</b> ■ ou bandes sèches à allongement court	
<b>Ulcère ouvert</b> (stade C6)	■ bandages multitypes en première intention ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ <b>ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) &gt; 36 mmHg</b>	Jusqu'à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

**Les contre-indications absolues de la compression médicale sont<sup>1</sup> :** L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0.6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la *phlegmatia cerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

**Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de<sup>1</sup> :** AOMI avec IPS entre 0.6 et 0.9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

2 : sf-phlebologie.org/Classification-ceap-de-la-maladie-chronique. Consulté le 30 juin 2020.

# NOS CONSEILS AUX PATIENTS<sup>1</sup>

## Mauvaise circulation veineuse

Des précautions lors des voyages en avion.

Les voyages aériens peuvent accentuer les troubles de la circulation veineuse, essentiellement parce qu'ils impliquent une immobilisation prolongée en position assise. Ce phénomène survient surtout en cas de vols longs ou répétés. Si vous avez déjà eu des problèmes veineux, consultez votre médecin avant vos déplacements.

**Dans tous les cas, essayez aussi de respecter les conseils suivants à bord de l'avion :**

- mettez des vêtements larges et évitez les gaines, ceintures et bottes ;
- portez une contention ou compression élastique veineuse (chaussettes, bas ou collant de contention), si elle vous a été prescrite ;
- bougez les pieds très souvent, faites des mouvements de flexion-extension des chevilles, ne croisez pas les jambes et marchez régulièrement dans le couloir de l'avion ;
- buvez abondamment (un litre toutes les quatre heures) car la pressurisation de la cabine entraîne une forte déshydratation ;
- évitez de consommer des somnifères : ils vous plongeraient dans un sommeil lourd pendant plusieurs heures et l'immobilité augmenterait la stase veineuse.

Ces recommandations sont également valables si vous devez entreprendre de longs trajets en voiture.

## Insuffisance veineuse

Ne pas exposer ses jambes à la chaleur.

La chaleur sur les jambes est néfaste en cas de problèmes veineux. Évitez :

- les bains trop chauds (les douches d'eau fraîche ne provoquent pas de dilatation des veines et soulagent les symptômes),
- le sauna et le hammam,
- l'épilation à la cire chaude,
- les expositions au soleil.

## Circulation veineuse

Attention au choix des vêtements et chaussures.

Le choix de vos vêtements et chaussures est important pour ne pas entraver la circulation sanguine veineuse au niveau des membres inférieurs. Il est préférable de ne pas porter de vêtements trop serrés, de ceintures ou de gaines. Évitez les bottes hautes qui compriment le mollet. Ne portez pas de mi-bas dont l'élastique serre le mollet. Chaussez-vous confortablement. Préférez aux chaussures à hauts talons des chaussures confortables avec des talons de 3 cm maximum.



# Informations

Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, les informations concernant les dispositifs médicaux de classe I (non-stérile) sont susceptibles d'être modifiées, après le 26 Mai 2021.

Dans le cadre du Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l'identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, nos codes LPP sont susceptibles d'être modifiés au cours de l'année.

## Mentions légales

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), sauf mouchoirs, cotobio, cotoaccess, cotodisques, cototiges, tg° gants non stérile. Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus d'informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant).

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I. Exceptions faites pour les produits suivants :

- Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Airstep® Walker, Velpeau® Abdominal Classic, fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd.
- Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite border, multisite border lite, heel, sacrum, non border, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Lohmann & Rauscher Medical UK Ltd. Évaluation de conformité réalisée par BSI (CE2797).
- Velpeau® Set Post-opératoire, Velpeau® Set Standard, Velpeau® Set Déterision, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux. Assembleur : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.
- Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH.
- Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s.a.
- Velpeau® Thorax Classic fabriqué par Intex.s.a.
- Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co.Ltd.
- Cellacast® Xtra, fabriqué par T&L Co., Ltd.
- Suprasorb® H fabriqué par T&L Co. Ltd., évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- iD Light, iD Intime, iD for Men, iD Pants, iD Slip, iD Protect, iD Expert Protect alèse, iD Form et iD Expert Fix Comfort Super fabriqués par Ontex BVBA.
- Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co., Ltd.
- Gants d'examen Sempercare®, fabriqués par Semperit Investments Asia Pte Ltd.

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Les gants d'examen Sempercare® sont des équipements de protection individuelle (EPI).

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

Velpeau® genouillère anatomique, Velpeau® genouillère Laxilatéral, Velpeau® genouillère Ligaction, Velpeau® genouillère articulaire, Velpeau® Genu, Velpeau® chevillère anatomique, Velpeau® chevillère Laxilatéral, Velpeau® chevillère Ligaction, Velpeau® chevillère articulaire sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les chevillères, genouillères et cuissards de compression.

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention.

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme, et City 3 sont certifiées ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvremignons élasto-compressifs de compression médicale des membres.

Consulter [www.asqual.com](http://www.asqual.com)



### Laboratoires Lohmann & Rauscher

ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France

Tél. : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07

E-mail : [LRmed@fr.LRmed.com](mailto:LRmed@fr.LRmed.com)

SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091

Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015



People.Health.Care.™



# CATALOGUE PHARMACIE

MAI  
2021

Traitement des plaies

Compression médicale

Gamme blanche et Hygiène

Incontinence



# BIENVENUE CHEZ LOHMANN ET RAUSCHER !



Le bien-être de nos collaborateurs, clients, utilisateurs et patients est au cœur de nos activités.

## People.



Avec expertise et soin, nous sommes aux côtés de nos clients, collaborateurs, utilisateurs et patients.

## Care.

## Health.

Notre champ de compétences. La santé définit notre vision et nos valeurs.

N° de client : .....

Coordonnées de votre délégué



Un seul numéro :  
**03 29 26 25 79**





## **p. 4 à 23**

p. 6 à 17

p. 18 à 19

p. 20 à 21

p. 22 à 23

## **Traitement des plaies**

Pansements techniques

Sets de soins

Soins post-opératoires

Pansements Velpeau®



## **p. 24 à 31**

p. 26

p. 27

p. 28

p. 30 à 31

## **Compression médicale**

Bandes sèches  
à allongement court

Kit de compression  
à allongement court

Bandes sèches à  
allongement long

Bandes cohésives et  
adhésives



## **p. 32 à 45**

p. 34 à 35

p. 36

p. 37

p. 38 à 40

p. 41 à 43

p. 44 à 45

## **Gamme blanche et Hygiène**

Maintien et fixation

Compresses

Ophtalmologie

Coton

Immobilisation

Gants Sempercare®



## **p. 46 à 53**

p. 48

p. 49

p. 50

p. 51

p. 51

## **Incontinence**

Protections anatomiques

Sous-vêtements absorbants

Changes complets

Alèses

Slips de maintien



# TRAITEMENT DES PLAIES

**À chaque plaie son pansement**

**ER** People Health Care™

Indication	Produit	Caractéristiques	Avantages
Plaies superficielles, abrasions, brûlures, coupures, lésions de la peau.	Debrisoft® G	Adhésif, transparent, imperméable.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® A	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® B	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® C	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® D	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® E	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® F	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® G	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® H	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® I	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® J	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® K	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® L	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® M	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® N	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® O	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® P	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® Q	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® R	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® S	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® T	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® U	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® V	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® W	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® X	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® Y	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.
Plaies profondes, ulcères, plaies chroniques.	Debrisoft® Z	Adhésif, transparent, avec couche adhésive.	Facile à appliquer, ne colle pas.

Notre service client à votre écoute  
 Par téléphone : 05 20 20 20 79 • Par fax : 05 20 20 20 78  
 Par email : [pharmacie@er.fr](mailto:pharmacie@er.fr)  
 Ou contactez votre dépositaire ou votre pharmacien.

Poster Plaies-Pansements

Livret de plaies

### Debrisoft® Pad

Une référence en matière de détergence mécanique

**EFFICACE** comme toujours !

Debrisoft® Pad garantit :

- Une détergence rapide et efficace !
- Une application facile et sûre !
- Prépare l'intérior !

Avantages :

- Résultats visibles en 2 à 4 minutes !
- Humidifie, nettoie et c'est formé !
- Augmentation de l'absorption patient !

**SIMPLE** pour tous !

**MODE D'EMPLOI**

- 1. Humidifier**  
Le Debrisoft® Pad nettoie efficacement lorsqu'il est humidifié au préalable. Debrisoft® Pad fibre spéciale à la fibre de polypropylène assure à des vitesses extraordinaires pour le nettoyage des plaies, ulcères, brûlures. En fonction de la nature de la plaie, utiliser le Debrisoft® Pad humide.
- 2. Nettoyer**  
Stroper le pad en recouvrant une large partie de la plaie. Faire des mouvements circulaires pour nettoyer la plaie. En cas de plaie à risque d'infection, utiliser le Debrisoft® Pad humide.
- 3. Et c'est terminé**  
L'application du Debrisoft® Pad nettoie, humidifie, prépare et protège la plaie. Respecter les directives écrites en matière d'hygiène.

**Mode usage :**

- Atteinte et active l'hygiène et les spores.
- Élimine le biofilm.
- Protège les tissus sains.



**Indications :**

- Détection des plaies superficielles aiguës et chroniques ainsi que la peau professionnelle.

**Caractéristiques :**

- Dimension : 10x10
- Couleur : Blanc
- Boîte de 3
- N° de référence : 8000400000
- Code EAN : 3300000000000

# Pansements techniques

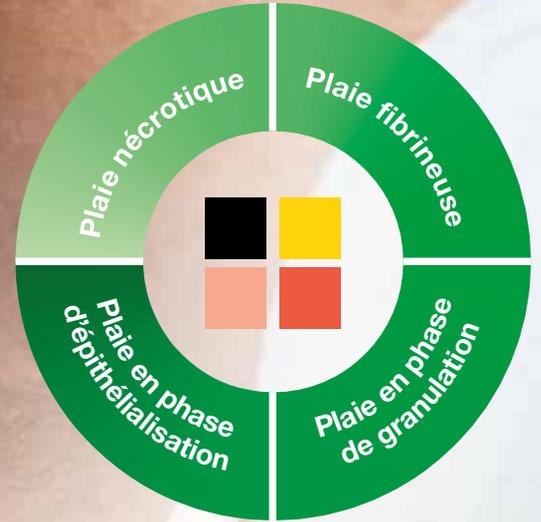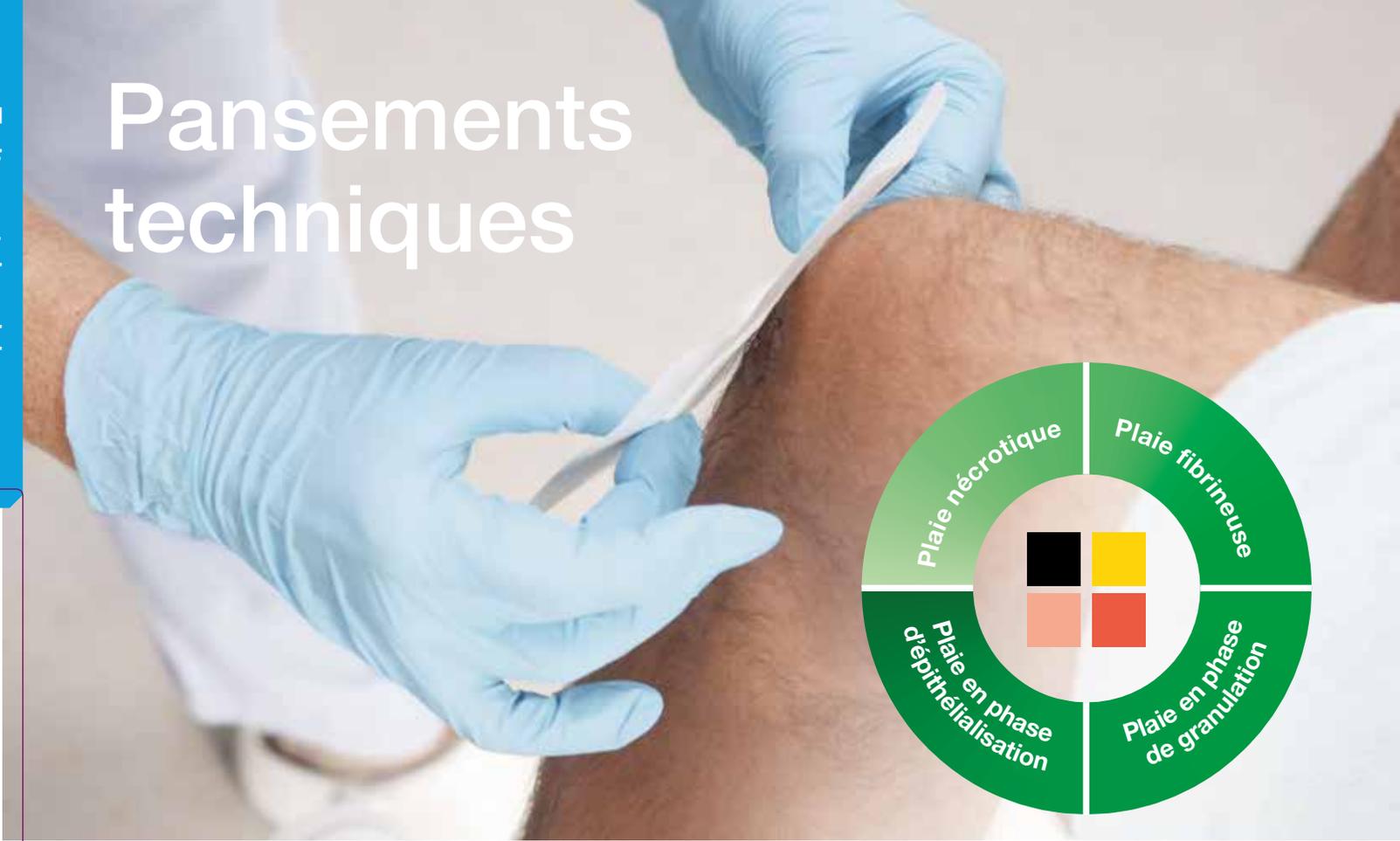

## Debrisoft® Pad Compresse de déterSION



**Indications :** déterSION des plaies aiguës ou chroniques superficielles et ainsi que pour le tissu cutané environnant :

- ulcère diabétique
- ulcère artériel ou veineux
- ulcère de décubitus
- plaies postopératoires, en seconde intention
- plaies traumatiques ou chirurgicales (notamment les égratignures, incisions, lacérations)
- brûlures et ébouillantages (3e degré après débridement chirurgical)
- oedèmes lymphatiques

Convient aux peaux sèches, fragiles, hyperkératosiques, séborrhéiques ou grasses, saines ou endommagées.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Debrisoft® Pad est un élément composé de fibres de polyester et d'une couche de support en polyacrylate, ainsi que d'une languette de préhension en polyester, polyamide et élasthane.

Debrisoft® Pad permet un débridement rapide, efficace et quasiment sans douleur. Il peut être utilisé pendant le débridement pour l'absorption d'exsudats, de débris et de kératose et préserve les tissus sains.

Debrisoft® Pad procure également de bons résultats, y compris pour les plaies avec une couche de kératose ou de nécrose importante si ces plaies ont subi au préalable un traitement autolytique.

1 : Notice d'utilisation.

### DM Classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	34321	4056649070351	1 boîte de 5
13 x 20	34323	4056649070436	1 boîte de 5



# La maîtrise de l'exsudat.

## Vliwasorb® Pro Super-absorbant non adhésif



**Désignation :** Pansement super-absorbant, une solution pour le traitement des plaies en phase d'exsudation.

**Indications :** Prise en charge des plaies modérément à très fortement exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Bonne capacité d'absorption et de rétention<sup>2</sup>. Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient. Ses bords larges et son design ergonomique favorisent une application aisée sur les zones difficiles à panser.

**Combinaison :** Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb A pour soigner les plaies profondes.<sup>1</sup>

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-112.

### DM Classe IIb

Codes LPP : 6323589, 6323566, 6323550, 6323508, 6323520, 6323537, 6323520, 6323508

LPP\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	6 x 6	34460	4056649071945	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	34461	4056649071976	1 boîte de 10
12,5 x 22,5	18,5 x 8,5	34462	4056649072003	1 boîte de 10
22 x 22	18 x 18	34463	4056649072034	1 boîte de 10
22 x 32	28 x 18	34464	4056649072065	1 boîte de 10
17,5 x 17,5	12,5 x 12,5	34465	4056649072096	1 boîte de 10
25 x 30	25 x 20	34466	4056649072126	1 boîte de 10
20 x 25	20 x 15	34467	4056649072157	1 boîte de 10

\* Prise en charge dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement.

## Vliwasorb® Super-absorbant adhésif

**Désignation :** Combine l'efficacité du pansement super-absorbant avec les atouts d'une membrane adhésive pour une application aisée.

**Indications :** Prise en charge des plaies très exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Bonne capacité d'absorption et de rétention. Prévient l'adhésion aux tissus néoformés grâce à son interface en polyéthylène. Limite le relargage d'exsudat, prévient le phénomène de macération<sup>2</sup>.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2016-015.

### DM Classe IIb

Codes LPP : 6323448, 6323431, 6323419

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
12 x 12	31991	4056649397519	1 boîte de 10
15 x 15	31992	4056649397533	1 boîte de 10
15 x 25	32993	4056649397557	1 boîte de 10

\* Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterision et de bourgeonnement.



Couche côté plaie  
non adhérente en polyéthylène

Couche de distribution

Couche super-absorbante :  
billes de polyacrylate de sodium  
fixées dans la partie en cellulose

Couche de protection des  
vêtements en non-tissé bleu



# Suprasorb® P sensitive

## Pansements hydrocellulaires siliconés

**Versions border :** border, sacrum, heel, multisite border.

**Versions border lite :** border lite, multisite border lite.

**Indications border :** Prise en charge des plaies moyennement à fortement exsudatives.

**Indications border lite :** Prise en charge des plaies faiblement à moyennement exsudatives.

**Indications non border :** Prise en charge des plaies moyennement exsudatives. Indiqués pour les plaies superficielles ou profondes telles que : ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffes.

**Propriétés :** La construction triple couche (version non-border) permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide optimal pour les plaies favorisant une cicatrisation plus rapide et contribuent à réduire le risque de macération. La construction quadruple couche (versions border lite), ou la construction quintuple couche (versions border) permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement

humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération. La couche douce en silicone peut être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence. De plus, cette couche peut aider à minimiser la douleur chez les patients ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau environnante lors du changement de pansement. La couche de mousse polyuréthane fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.

**Composition versions border, border lite :** Une couche de contact avec la plaie en silicone, une couche de mousse polyuréthane, une couche avec rembourrage super-absorbant (versions border), un film imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau<sup>2</sup>.

**Composition versions non-border :** Une couche de contact avec la plaie en silicone, d'une mousse de polyuréthane absorbante et d'un film externe protecteur.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DF-2018-050. 3 : DF-2018-061. 4 : DF-2018-053.

Border = avec bord auto-fixant. Border lite = extra mince avec bord auto-fixant.

Non border = sans bord auto-fixant. Heel = talon

\*\* En association avec un pansement primaire.

### DM classe IIb Code LPP : 6319783, 6319808, 6319790, 6319777, 6319760

LPP\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Border (avec bord auto-fixant)</b>				
8,5 x 7,5	5 x 4,5	109068	4056649355366	1 boîte de 10
10 x 10	6,2 x 6,2	109061	4056649355182	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	109062	4056649355205	1 boîte de 10
15 x 15	10,5 x 10,5	109069	4056649355380	1 boîte de 10
20 x 20	15 x 15	109070	4056649355434	1 boîte de 10



### Code LPP : 6319814, 6319850, 1333198, 1328493

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Non border (sans bord auto-fixant)</b>			
10 x 10	139592	4056649979326	1 boîte de 10
10 x 20	139593	4056649979340	1 boîte de 10
15 x 20	139596	4056649979388	1 boîte de 10
20 x 20	139597	4056649979425	1 boîte de 10



### Code LPP : 6319754, 6319748, 6319725, 6319731, 6319719, 6319702

LPP\*\*\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Border lite (extra mince avec bord auto-fixant)</b>				
5 x 5	2,5 x 2,5	109080	4056649356165	1 boîte de 10
10 x 5	6 x 2,5	109081	4056649356189	1 boîte de 10
8,5 x 7,5	5 x 4,5	109086	4056649356288	1 boîte de 10
10 x 10	6,2 x 6,2	109083	4056649356226	1 boîte de 10
15 x 9	10,5 x 5	109087	4056649356301	1 boîte de 10
20 x 10	15 x 5	109088	4056649356325	1 boîte de 10



### DM classe IIb Codes LPP : 1373393, 1351368, 1305606

LPP\*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Sacrum</b>				
17 x 17,5	12 x 12,5	139365	4056649917731	1 boîte de 10
23 x 23	16,5 x 17	139566	4056649929512	1 boîte de 10
<b>Heel (talon)</b>				
23,5 x 25	17,5 x 19	139366	4056649917755	1 boîte de 10



\* Prise en charge assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel (localisés dans les endroits difficiles à panser, pour les versions Multisite border, Heel et Sacrum).


\*\*\* Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement.

# SUPRASORB P SENSITIVE

## LA FORCE DE LA DOUCEUR.



DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES VERSIONS :

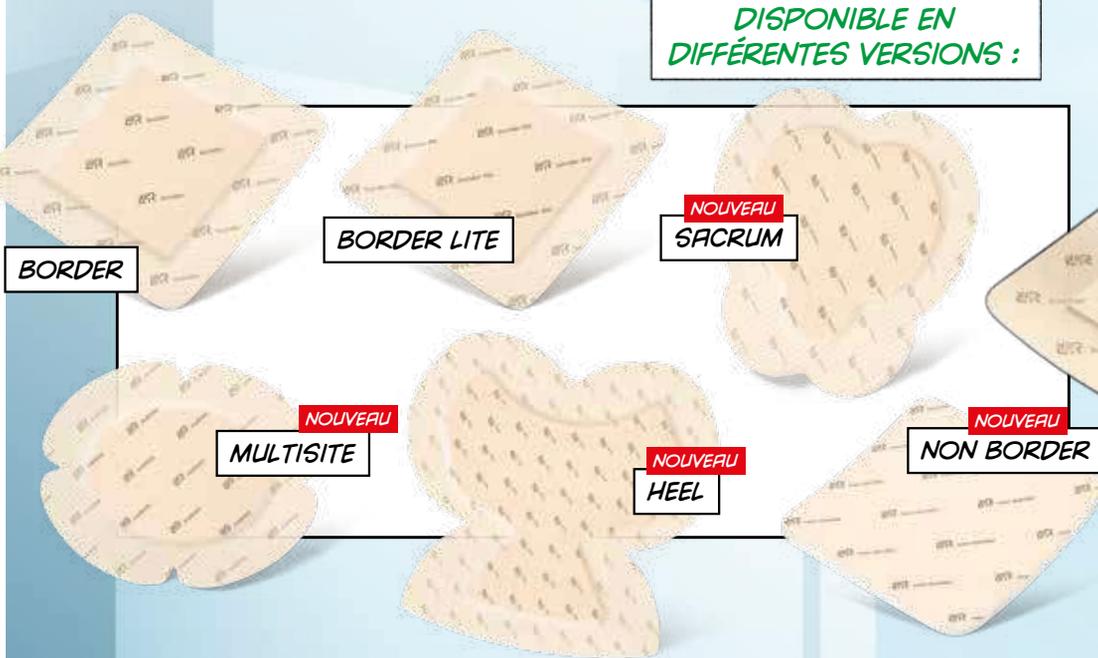

BORDER

BORDER LITE

NOUVEAU  
SACRUM


NOUVEAU  
MULTISITE

NOUVEAU  
HEEL

NOUVEAU  
NON BORDER



### APPLICATION FACILE<sup>3</sup>

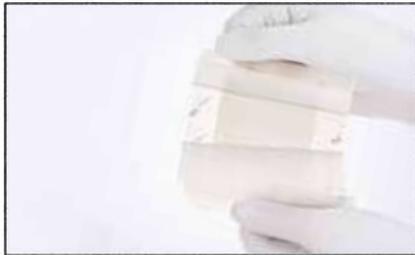

GRÂCE À SES 2 OU 3 FEUILLETS PERMETTANT D'ÉVITER DE TOUCHER L'ADHÉSIF AVEC LES GANTS

### CINQ COUCHES DE DOUCEUR POUR LES PEAUX SENSIBLES<sup>4</sup>

Film externe protecteur :

Noyau super-absorbant :

POUR LES VERSIONS BORDER


Couche en non-tissé :

SAUF POUR LES VERSIONS NON BORDER

Mousse absorbante en PU\* :

Couche de contact avec la plaie en silicone OptiSil :

\* polyuréthane

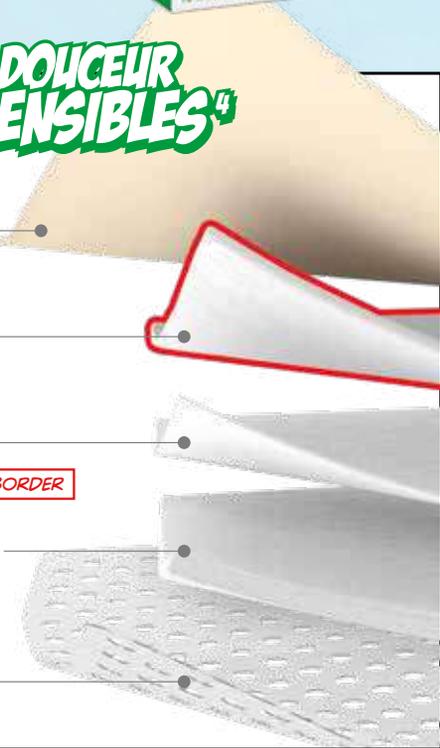

DM classe IIb Codes LPP : 6319725

LPP\*\*\*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>multisite border lite</b>				
7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	142080	4063591409160	1 boîte de 10



multisite border lite



DM classe IIb Codes LPP: 6319783, 6319790, 6319978

LPP\*



Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Multisite border</b>				
7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	142078	4063591409108	1 boîte de 10
12 x 15	7 x 10	139367	4056649917816	1 boîte de 10
16 x 20	11,5 x 15,5	142079	4063591409139	1 boîte de 10



multisite border



# Suprasorb® P Hydrocellulaire

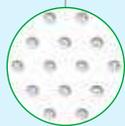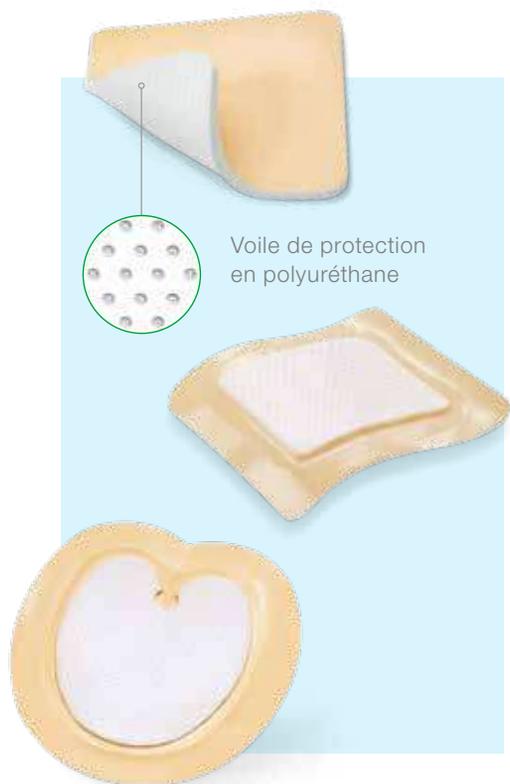

Voile de protection en polyuréthane

**Désignation :** Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité<sup>4</sup>, souple et doux.<sup>1</sup>

**Indications :** Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, etc.).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforée au contact de la plaie. Suprasorb P favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide<sup>2</sup>, gère efficacement l'exsudat<sup>3</sup> et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité<sup>4</sup>. Maintien du milieu humide qui préserve les tissus néo-formés lors du retrait<sup>4</sup>.

1 : DFC-2016-019. 2 : DFC-2016-051. 3 : DFC-2016-020. 4 : Notice d'utilisation.

## DM Classe IIb

Codes LPP : adhésif : 6319949, 6319808, 6319777, 6319978 ; sacrum adhésif : 1345907 ; non adhésif : 6319837, 6319820, 6319814, 6319872, 6319850

LPP\*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>adhésif</b>				
7,5 x 7,5	4 x 4	82014	4056649398059	1 boîte de 10
10 x 10	6 x 6	82035	4056649398073	1 boîte de 10
15 x 15	10 x 10	20425	4056649396840	1 boîte de 10
15 x 20	15 x 10	20426	4056649396864	1 boîte de 10
<b>sacrum, adhésif</b>				
18 x 20,5	14,3 x 12	20535	4056649397007	1 boîte de 10
<b>non adhésif</b>				
5 x 5		82039	4056649398097	1 boîte de 10
7,5 x 7,5		82044	4056649398110	1 boîte de 10
10 x 10		82045	4056649398134	1 boîte de 10
15 x 15		20421	4056649396802	1 boîte de 10
15 x 20		20422	4056649396826	1 boîte de 10



\* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement.

# Suprasorb® G Hydrogel



**Désignation :** Pansement hydrogel non adhésif.

**Indications :** Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie. Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Le pansement gel offre un milieu humide à la surface de la plaie. Le pansement n'adhèrera pas au tissu sous-jacent lors de son retrait si on ne le laisse pas sécher.

1 : Notice d'utilisation.

## DM Classe IIb

Codes LPP : 6320119, 6320102

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
<b>Pansement hydrogel</b>				
5 x 6,5	34630	4056649397694	1 boîte de 5	LPP
10 x 10	34631	4056649397717	1 boîte de 5	LPP
20 x 20	33632	4056649031802	1 boîte de 3	Non remboursé



\* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion.

# Suprasorb® A Alginate de calcium


## Suprasorb® A+ Ag Alginate de calcium antimicrobien

**Indications :** Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons. Pour plaies infectées ou présentant un risque d'infection utiliser Suprasorb A+Ag).

**Caractéristiques :** Fibre d'alginate de calcium pur, grande capacité d'absorption des exsudats<sup>1</sup>. Formation rapide de gel<sup>2</sup> qui maintient le milieu humide. Doux et souple<sup>3</sup> pour une haute conformabilité<sup>4</sup>. Polymères d'acides alginiques caractérisés par leurs propriétés hémostatiques<sup>3</sup>.

**Combinaison :** Fixer à l'aide du Suprasorb H.<sup>5</sup>

1 : DFC-2016-052. 2 : DFC-2016-053. 3 : Bon usage des technologies médicales – Les pansements HAS. 2011. 4 : DFC-2016-010. 5 : Notice d'utilisation.

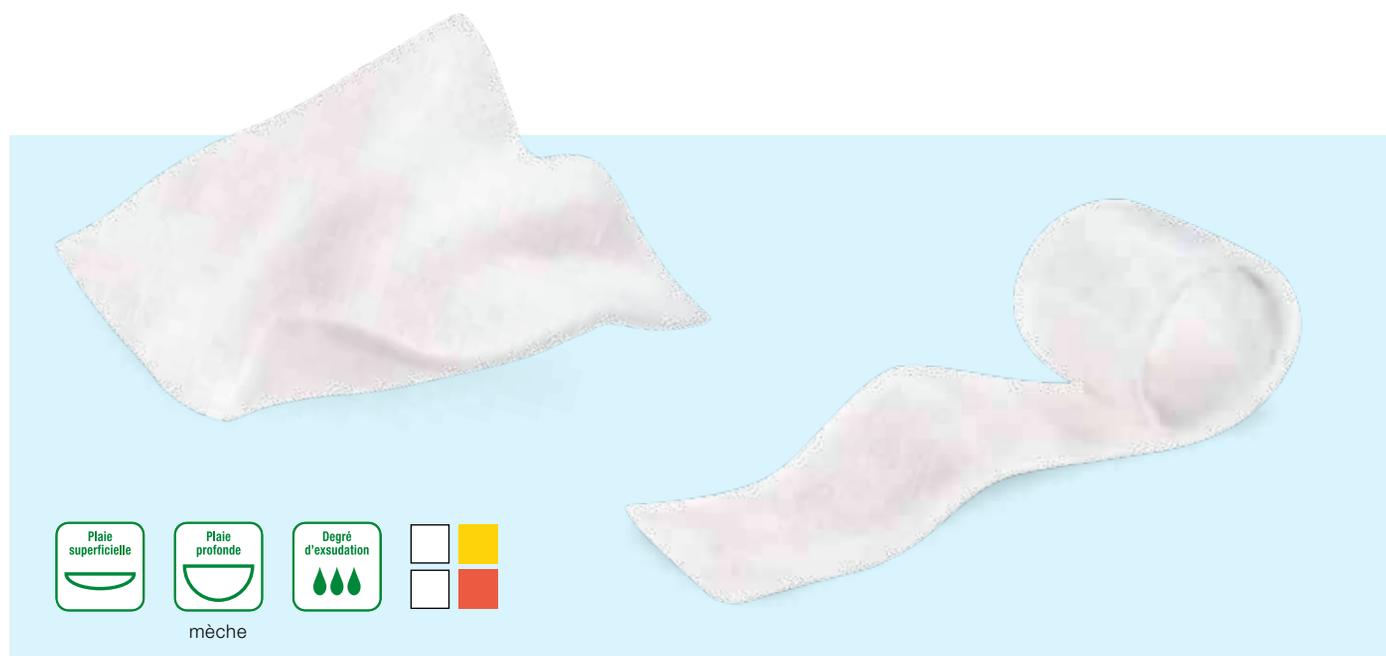

### Suprasorb® A : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320250, 6320243

LPP\*

Dimensions (cm)	Poids	RÉF.	EAN	Conditionnement	
<b>Compresse</b>					
5 x 5		24868	4056649397267	1 boîte de 10	Non remboursé
10 x 10		24869	4056649397281	1 boîte de 10	LPP
10 x 20		24870	4056649397304	1 boîte de 10	LPP
<b>Mèche</b>					
30 x 5	2 g	24867	4056649397243	1 boîte de 5	Non remboursé


\* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion, ainsi que pour les plaies très exsudatives.

### Suprasorb® A+Ag : DM classe III

Non remboursé

Dimensions (cm)	Poids	RÉF.	EAN	Conditionnement	
<b>Compresse</b>					
5 x 5		20570	4021447930336	1 boîte de 10	
10 x 10		20571	4021447930367	1 boîte de 10	
10 x 20		20572	4021447930398	1 boîte de 5	
<b>Mèche</b>					
30 x 5	2 g	20573	4021447930428	1 boîte de 5	

# Respecter l'environnement de la plaie.

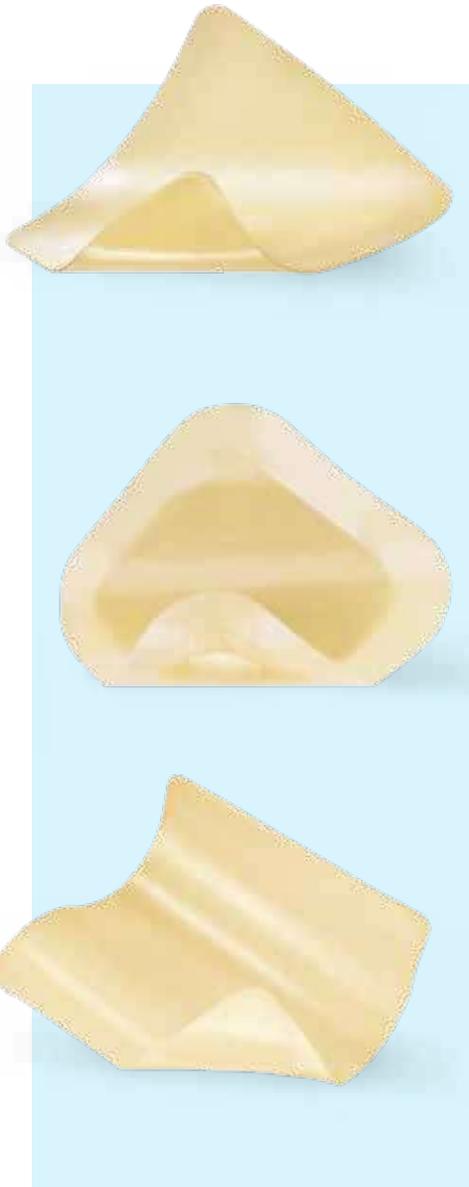

## Suprasorb® H Hydrocolloïde

**Indication Standard, Border et Sacrum<sup>1,2</sup>** : Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à moyennement exsudatives telles que les ulcères de pression, de jambe et diabétiques, brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, plaies post-opératoires et écorchures.

**Indication Fin** : Brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, ulcères diabétiques, plaies post-opératoires et écorchures.

**Caractéristiques<sup>1</sup>** : Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide. Pansement perméable à la vapeur d'eau et permet la douche<sup>3</sup>.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-014. 3 : DFC-2020-024.

### Standard/sacrum/border\*\* : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320295, 6320361, 6320326, 6320272, 6382770



LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Standard</b>			
10 x 10	140128	4063591042299	1 boîte de 10
15 x 15	140129	4063591042336	1 boîte de 10
20 x 20	140130	4063591042374	1 boîte de 10
<b>Sacrum</b>			
14 x 16	140127	4063591042251	1 boîte de 10
<b>Border</b>			
14 x 14	140126	4063591042213	1 boîte de 10

### Fin : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320289, 6320303, 6320295, 6320295, 6320361, 6320326



LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Fin</b>			
5 x 5	140125	4063591042176	1 boîte de 10
5 x 10	140124	4063591042091	1 boîte de 10
5 x 20	140121	4063591041490	1 boîte de 10
10 x 10	140123	4063591041773	1 boîte de 10
15 x 15	140122	4063591041575	1 boîte de 10
20 x 20	140120	4063591041254	1 boîte de 10

\* Prise en charge assurée pour les plaies chroniques en cas de traitement séquentiel.


\*\* Border : à bord auto-fixant



Pour plus d'informations consultez :  
[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)



## Lomatuell® H Pansement gras

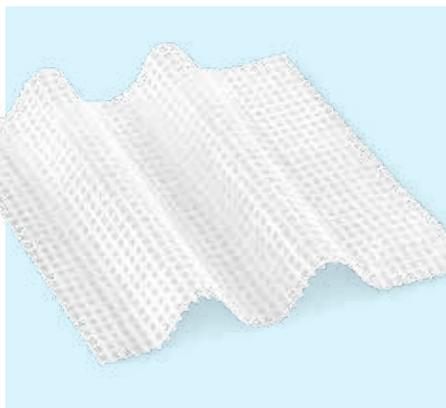

**Indications :** Prise en charge des sites donneurs de greffes, ulcères de jambe, escarres, brûlures, coupures et abrasions.

**Caractéristiques :** Produit stérile composé d'une trame 100 % coton imprégnée de vaseline<sup>1</sup>.

1 : Notice d'utilisation.

### DM Classe IIb

Code LPP : 6320473

LPP\*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
10 x 10	18295	4056649396789	1 boîte de 10	LPP
5 x 5	23314	4021447233161	1 boîte de 10	Non remboursé
20 x 10	23316	4021447233147	1 boîte de 10	Non remboursé

\* Prise en charge assurée en phase de bourgeonnement.

## Suprasorb® F Film polyuréthane Une fixation adaptée



**Indications Non Stérile :** Prophylaxie de soutien des zones cutanées à risque d'escarres, à la fixation dans le traitement des plaies et au premiers soins pour les plaies mineures et superficielles.

**Indications Stérile :** Plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.

**Caractéristiques :** Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate. Imperméable aux bactéries et à l'eau<sup>2</sup>, perméable à la vapeur d'eau<sup>1</sup>. Système de pose pratique pour une application facilitée<sup>3</sup>.

Version non stérile en rouleau à découper.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-025. 3 = DFC-2020-133. 4 = DF-2016-024.

### Non stérile : DM Classe I

Codes LPP : 6320208, 6320214, 6320214

LPP\*

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>en rouleau, non stérile</b>			
1 m x 10 cm	82084	4056649398332	1
10 m x 10 cm	82063	4056649398257	1
10 m x 15 cm	82064	4056649398271	1

### Stérile : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320154, 6320148, 6320183, 6320131, 6320177

LPP\*

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>stérile, scellé en emballage individuel</b>			
5 cm x 7 cm	82799	4056649398592	1 boîte de 10
10 cm x 12 cm	82800	4056649398615	1 boîte de 10
10 cm x 25 cm	82061	4056649398219	1 boîte de 10
15 cm x 20 cm	82801	4056649398639	1 boîte de 10
20 cm x 30 cm	82062	4021447498928	1 boîte de 10



4




\* Pour la version stérile, prise en charge en cas de maintien d'autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques, en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives, protection de sites de cathéters intraveineux. Pour la version Non stérile, prise en charge pour le recouvrement de pansements nécessitant une imperméabilité.

# Vliwaktiv® Vliwaktiv® Ag

**Indications :** Traitement des plaies malodorantes. Vliwaktiv Ag est indiqué pour le traitement des plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevé.

**Caractéristiques :** Vliwaktiv : compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs<sup>2</sup>, agit comme un anti-bactérien<sup>3</sup>. Vliwaktiv Ag : diminue la multiplication des germes dans la plaie et prévient l'infection<sup>1</sup>.

1 : Notice Vliwaktiv Ag. 2 : DFC-2020-015. 3 : DFC-2020-016.

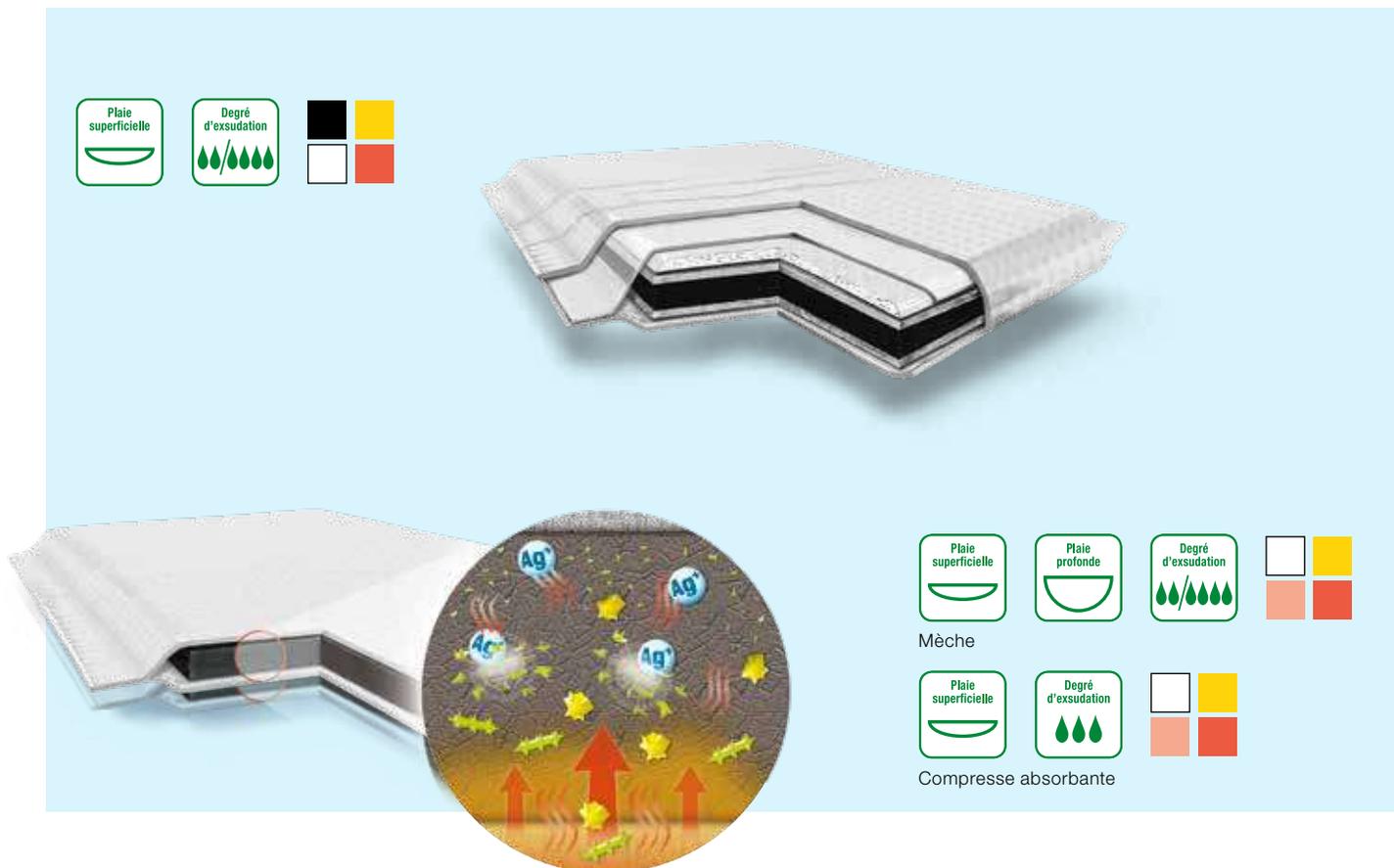

## Vliwaktiv® : DM classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	20254	4021447037509	20
10 x 20	20255	4021447037530	20

## Vliwaktiv® Ag : DM classe IIb

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Mèche au charbon actif et à l'argent</b>			
6,5 x 10	20700	4021447309163	10
10 x 10	20701	4021447309224	10
10 x 15	20702	4021447309286	10
<b>Comresse absorbante au charbon actif et à l'argent</b>			
10 x 10	20705	4021447309347	10
10 x 20	20706	4021447309408	10
20 x 20	20707	4021447309460	10

## Vliwazell® Pansement américain stérile



**Nouvelle indication :** Indiqué pour absorber sur les plaies superficielles présentant des niveaux d'exsudat modérés à élevés.

**Caractéristiques :** Stérile. Enveloppe en non-tissé. Garnissage absorbant¹.  
1 : DF-2016-054.

### DM Classe Is

Codes LPP : 6323394, 6323388, 6323371

LPP

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Stérile, scellé en emballage individuel</b>			
10 x 10	98088	4056649513483	8 boîtes de 10
15 x 20	98089	4056649513506	6 boîtes de 10
20 x 25	98090	4056649513520	4 boîtes de 10



## Metalline® trachéo

**Indications :** Compresse pour trachéotomie.

**Caractéristiques :** Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres sont finement aluminées sur la face en contact avec la plaie. Cette surface lisse et brillante est non-adhérente à la plaie¹.

1 : DFC-2016-055.



### DM Classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Stérile, scellée en emballage individuel</b>			
8 x 9	23094	4021447230948	50 compresses



## Suprasorb® C Collagène

**Indications :** Soins des ulcères diabétiques, des escarres de décubitus, des ulcères veineux ou vasculaires mixtes et à la cicatrisation secondaire des plaies chirurgicales. Suprasorb C est notamment indiqué pour des plaies stagnantes lorsque les autres types de pansements ont débouché sur des impasses thérapeutiques.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Composé de collagène bovin, il favorise la cicatrisation par apport de collagène qui va favoriser la formation de fibres de collagènes propres à l'organisme.

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

### DM Classe III

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 x 6 x 0,8	23267	4056649397021	1 boîte de 5
6 x 8 x 0,8	23268	4056649397045	1 boîte de 5
8 x 12 x 0,8	23269	4056649397069	1 boîte de 5



## Opraclean® Gaze iodoformée

**Indications :** Pour le mèche et le drainage antiseptiques des plaies après débridement chirurgical, d'abcès, fistules, ulcères ainsi que des cavités corporelles.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gaze en coton, absorbante et imprégnée de iodoforme<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> : Notice d'utilisation.

### DM Classe III

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Opraclean Mèche de gaze iodoformée 23g/100 cm<sup>2</sup></b>			
5 x 1	13580	4021447135809	1
5 x 2	13581	4021447135816	1
5 x 5	13582	4021447135823	1
<b>Opraclean Gaze tubulaire iodoformée 28g/100 cm<sup>2</sup></b>			
5 x 8	13583	4021447135830	1
<b>Opraclean Gaze absorbante iodoformée 57g/100cm<sup>2</sup></b>			
5 x 6	13584	4021447135847	1
5 x 8	13585	4021447135854	1

Nos pansements  
n'auront plus  
de secret  
pour vous  
**avec nos  
CLASSES  
VIRTUELLES**



Classes virtuelles  
disponibles sur  
**Velpeau.fr**

Demandez à votre délégué.



# Sets de soins

Un set permet de faire  
3 soins (post-op) ou  
5 soins (standard et déterSION).

Réalisation de  
pansements étanches  
permettant la douche.

Adapté à  
la douche



## Velpeau® set Post-opérateur

### Set de pansement pour plaies suturées non infectées

**Indications :** Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées. Ablation des fils sur plaies suturées. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

Source : Étiquetage.



Codes LPP : 6323939, 6323922, 6323916

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Post-op Petites plaies	190036	4063591355443	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Moyennes plaies	190037	4063591355467	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Grandes plaies	190038	4063591355481	1 carton de 6

### Velpeau® set Post-opérateur

**190036**  
Velpeau® set  
Post-op  
petites plaies

**190037**  
Velpeau® set  
Post-op  
moy. plaies

**190038**  
Velpeau® set  
Post-op  
grandes plaies

3 Blisters Stériles composés chacun de :	< 5cm	5 à 10cm	> 10cm
Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1	1
Pincés anatomiques	2	2	2
Compresse non-tissées 7,5 cm x 7,5 cm	5		
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm		5	10

#### Hors blister

Pansements adhésifs avec compresse stériles 8 cm x 10 cm	3		
Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	3		
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 15 cm		3	
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 20 cm		3	
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 25 cm			3
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 30 cm			3
Sacs collecteurs de déchets	3	3	3
Coupe-fils stérile	1	1	1
Notice	1	1	1

## Velpeau® set Standard

Set de pansement pour plaies chroniques avec paire de ciseaux

**Indications :** Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

**Caractéristiques :** Set de pansement avec paire de ciseaux pour ajuster au besoin la dimension du pansement primaire (non fourni).

Source : Notice.



## Velpeau® set DéterSION

Set de pansement pour plaies chroniques avec curette

**Indications :** Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine nécessitant une déterSION mécanique. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

**Caractéristiques :** Set de pansement avec curette pour la déterSION et/ou le nettoyage des plaies avec présence de tissus nécrotiques et/ou fibrineux (se conformer à la prescription médicale).

Source : Notice.



Codes LPP : 6323951, 6323945

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Standard	108870	4056649377320	1 carton de 6
Velpeau set DéterSION	108871	4056649377337	1 carton de 6

### Velpeau® sets Standard et DéterSION

Sets de pansement pour plaies chroniques

**108870**  
Velpeau® set  
Standard  
avec paire de ciseaux

**108871**  
Velpeau® set  
DéterSION  
avec curette

#### 5 Blisters Stériles composés chacun de :

Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1
Pincés anatomiques	2	2
CompresseS non-tissées 10 cm x 10 cm	10	
CompresseS gaze coton hydrophile 10 cm x 10 cm		10

#### Hors blister

Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	5	5
Sacs collecteurs de déchets	5	5
Paire de ciseaux stérile	1	
Curette avec grattoir stérile		1
Notice	1	1

# Soins post-opératoires



## Curafix® H

**Désignation :** Sparadrap non-tissé extensible, découpable.

**Indications :** Pour la fixation de pansements, canules et drains.

### DM Classe I

Codes LPP : 1307226, 1321924, 1321924, 1321924

LPP\*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 m x 5 cm	190200	4056649889328	1
10 m x 10 cm	190201	4056649889335	1
10 m x 15 cm	190202	4056649889342	1
10 m x 20 cm	190203	4056649889359	1

\* Indiqués pour de la fixation sur zone de mouvement.

## Curapor®

**Désignation :** Pansement adhésif chirurgical stérile.

**Indications :** Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, 1<sup>ers</sup> soins (coupures, entailles...). Plaies légèrement à modérément exsudatives.

**Caractéristiques :** Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau<sup>1</sup>, laisse la peau respirer<sup>2</sup>. Compresse centrale. 2 films applicateurs/protecteur en silicone. La compresse du pansement est appliquée sur la peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées). La partie adhésive est posée sur la peau saine. Produit fini non fabriqué à partir de matériaux contenant du latex d'origine naturelle<sup>3</sup>.

1 : DFC-2016-075. 2 : DFC-2016-076. 3 : DFC-2016-077.



### DM Classe Is

Codes LPP : 6323365, 6323359, 6323342, 6323336

LPP\*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 7 cm	32960	4021447842608	1 boîte de 10
8 x 10 cm	32961	4021447842639	1 boîte de 10
10 x 15 cm	32962	4021447842660	1 boîte de 10
10 x 20 cm	32963	4021447842691	1 boîte de 10

\* Prise en charge assurée en tant que pansements dans les soins des plaies aiguës suturées et des incisions chirurgicales.

## Curapor® transparent

**Indications :** Protection des plaies post-opératoires et petites blessures.

**Caractéristiques :** Recommandé pour la douche<sup>1</sup>. Support transparent en polyuréthane avec compresse centrale non adhérente et absorbante et masse adhésive en polyacrylate<sup>1</sup>.  
1 : DF-2016-007.

### DM Classe Is

Codes LPP : 6323320, 632313

LPP\*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 7 cm	82081	4056649398295	1 boîte de 5
8 x 10 cm	82082	4056649398318	1 boîte de 5

\* Prise en charge assurée pour la protection des plaies aiguës suturées légèrement hémorragiques et/ou exsudatives.



Pour plus d'informations consultez :  
[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)



# Pansements Velpeau®

Pour le recouvrement et l'absorption des fluides des plaies superficielles.



## Pansement spécial pour doigts

### Avantages<sup>1</sup> :

- Découpe spéciale pour les doigts, orteils et articulations
- Grande résistance et confortable
- Adapté aux égratignures, coupures superficielles
- Laisse respirer la peau

**Caractéristiques :** Pansement spécial textile avec compresse absorbante.

1 : DFC-2021-037.

### DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 pansements 38 x 66 mm	31229	4056649513872	1
10 pansements 38 x 73 mm			



## Pansements film bain, douche

### Avantages<sup>1</sup> :

- Résistant à l'eau et adapté pour le bain, la douche, la piscine
- Transparent et discret
- Pose facilitée
- Laisse respirer la peau

**Caractéristiques :** Film transparent avec compresse absorbante de couleur chair.

1 : DFC-2021-038.

### DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
6 pansements 50 x 72 mm	30970	4056649513711	1
4 pansements 38 x 72 mm			
2 pansements 25 x 57 mm			



## Pansements tattoos pour enfants

### Avantages<sup>1</sup> :

- Protège les petits bobos des enfants
- Amusant et facile à poser
- Résistant à l'eau et adapté pour le bain, la douche, la piscine
- Laisse respirer la peau

**Caractéristiques :** Film transparent décoré avec compresse absorbante.

Tattoos = tatouages

1 : DFC-2021-039.

### DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
12 pansements 25 x 57 mm	30981	4056649513735	1



## Bande à découper

Haute résistance - Multi-extensible

### Avantages<sup>1</sup> :

- A découper selon la taille de la plaie
- Adapté aux égratignures, coupures superficielles
- Laisse respirer la peau

**Caractéristiques :** Bandes à découper confortables<sup>1</sup> avec compresse absorbante.

Disponibles en 2 matières :

- Haute résistance<sup>2</sup> : support textile, 2 largeurs possibles
- Multi-extensible : support extensible non-tissé doux<sup>3</sup>

1 : DFC-2021-040. 2 : DFC-2021-041. 3 : DFC-2021-042.

### DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Haute résistance 1 m x 6 cm	31210	4056649513759	1
Haute résistance 1 m x 8 cm	31211	4056649513773	1
Multi-extensible 1 m x 6 cm	31212	4056649513797	1



## Pansements pré-découpés

Haute résistance - Multi-extensible - Transparent

### Avantages<sup>1</sup> :

- Pré-découpé et pratique
- Adapté aux égratignures, coupures superficielles
- Laisse respirer la peau

**Caractéristiques :** Pansements assortis pré-découpés confortables<sup>1</sup> avec compresse absorbante.

Disponibles en 3 matières :

- Haute résistance<sup>2</sup> : support textile
- Multi-extensible : support extensible non-tissé doux<sup>3</sup>
- Transparent : support plastifié transparent discret<sup>4</sup>

1 : DFC-2021-043. 2 : DFC-2021-044. 3 : DFC-2021-045. 4 : DFC-2021-046.

### DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Haute résistance – 30 pansements	31213	4056649513810	1
Multi-extensible – 30 pansements	31214	4056649513834	1
Transparent – 30 pansements	31215	4056649513858	1



# COMPRESSION MÉDICALE

Retournez  
votre catalogue  
et découvrez en  
page 52 notre gamme  
de chaussettes, bas et  
collants de compression  
Velpeau®  
VeinoCare®

Découvrez  
nos vidéos explicatives  
des techniques de pose



Retrouvez  
nos **podcasts**  
**de formation**  
sur la compression


Nos aides  
à la prescription  
et à l'utilisation :



Cas cliniques



Recommandations HAS

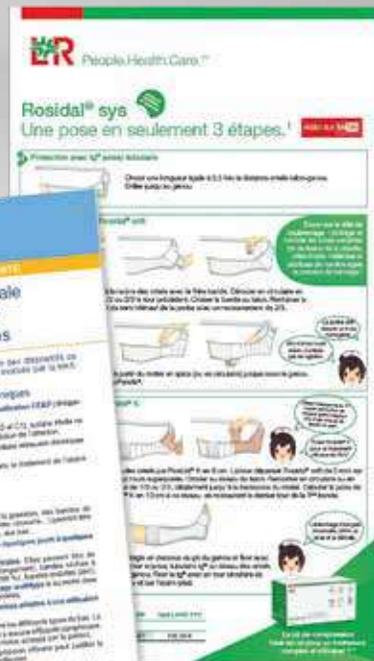

Posters de pose  
de bandes  
de compression

# Rosidal® K

## Une nouvelle donne dans la compression veineuse.



**La première et seule bande de compression à allongement court remboursée en France.**

Jusqu'à 50 fois.

**Désignation :** Bande de compression à **allongement court**.

**Indications :** Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphœdème (membre inférieur ou supérieur). Efficacité cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux et de l'insuffisance veineuse chronique.<sup>1,4</sup>

**Pas d'étalonnage nécessaire :** la bande se pose à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

**Caractéristiques<sup>5</sup> :** Bande de compression à allongement court. Composition : en coton. Peut rester en place jour et nuit<sup>2</sup> (sauf contre-indication médicale). Lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C.<sup>3</sup>

**Coloris :** Chair.

1 : Randomized controlled trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression patients with venous leg ulcers, Wong, I.K, et al. 2012.  
2 : DF-2016-012. 3 : DF-2016-032. 4 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al., 2011. 5 : Notice d'utilisation.

### DM Classe I

Codes LPP : 1346574, 1314746, 1359714, 1312598, 1352741, 1328518, 1387030

**LPP\***

Dimensions (longueur étirée)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
5 m x 4 cm	108820	4063591323879	1	125
5 m x 6 cm	108821	4063591323886	1	108
5 m x 8 cm	108822	4063591323893	1	108
5 m x 10 cm	108823	4063591323909	1	90
5 m x 12 cm	108824	4063591323916	1	54
10 m x 10 cm	108825	4056649334729	1	60
10 m x 12 cm	108826	4056649334736	1	40

\* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.

Retrouvez la technique de pose sur youtube et

[www.Lohmann-Rauscher.fr](http://www.Lohmann-Rauscher.fr)

Retournez votre catalogue et découvrez en page 56 notre gamme de chaussettes, bas et collants de compression Velpeau® VeinoCare®.

**NOUVEAU**



**Efficacité thérapeutique :**  
cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux.<sup>1,2</sup>

**Pose simple** à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

**Confort du patient.**  
Peut être porté jour et nuit\* : le bandage génère une pression de travail élevée et une pression au repos faible\*. Aucun reste à charge pour le patient.  
\*sauf contre-indication



**Réutilisable.**  
Les bandes Rosidal® K et Rosidal® Soft sont réutilisables et lavables jusqu'à 50 fois à 95 °C.<sup>4</sup>

**Économique<sup>2,4</sup>**  
Solution pour réduire le coût en cas de soins sur une période prolongée.

**Simplicité de prescription et d'utilisation.** Le kit possède tous les composants nécessaires à un traitement complet : gain de temps pour la prescription et l'utilisation.

# Rosidal® sys

## Le kit de compression tout-en-un pour un traitement complet et efficace.

Le premier kit réutilisable et remboursé

**Désignation :** Kit de compression à allongement court.

**Indications :** Pour les bandages de contention employés dans le traitement des ulcères veineux.

1 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al., 2011. 2 : Randomized control trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression in patients with venous leg ulcers, Wong et al., 2012. 3 : DF-2016-012. 4 : Notice d'utilisation.

Codes LPP : 1338557

LPP\*

RÉF.	EAN	Conditionnement
190008	4056649683674	4

Retrouvez la technique de pose sur youtube et [www.Lohmann-Rauscher.fr](http://www.Lohmann-Rauscher.fr)

\* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.



**Etape 1 :**  
protection avec la pose de tg® jersey tubulaire



**Etape 2 :**  
capitonnage avec la pose de Rosidal® soft



**Etape 3 :**  
compression avec la pose de Rosidal® K



**Fixation**



### Utilisation des repères de pose avec Velpeau® veine plus sans latex

### Tension de la bande



Pour que la pression soit régulière et appropriée, le triangle isocèle devient équilatéral lors de la pose.

### Recouvrement



A chaque tour, recouvrir complètement le triangle afin d'obtenir un recouvrement de 2/3 ou recouvrir de 50 % en utilisant la ligne bleue comme repère. Pour mieux distinguer la force de compression : une ligne bleue pour la légère et deux lignes bleues pour la forte.

Retrouvez nos vidéos sur [Velpeau.fr](http://Velpeau.fr)

## Velpeau® veine plus

**Désignation :** Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée (force 2 ou force 3 selon la LPP).

**Indications :** Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et l'immobilisation.

**Caractéristiques :** Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement. Velpeau veine plus permet au patient de se chauffer tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée).<sup>2</sup>

**Composition :** Viscose, polyester, polyamide, élasthanne.

**Coloris :** Chair.

1 : DF-2016-001. 2 : DF-2016-002.

### DM Classe I

Codes LPP : 6324318, 6324293, 6324270, 6324301, 6324287, 6324264, 6324258, 6324235, 6324212, 6324198, 6324229, 6324206, 6324181, 6324175

### Velpeau veine plus sans latex légère Force 2

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	32980	4021447856780	1	40
3,5 m x 8 cm	32982	4021447856827	1	12
4 m x 8 cm	32984	4021447856865	1	12
3 m x 10 cm	32981	4021447856803	1	36
3,5 m x 10 cm	32983	4021447856841	1	24
4 m x 10 cm	32985	4021447856889	1	24
5 m x 10 cm	32986	4021447856902	1	24

### Velpeau veine plus sans latex forte Force 3

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	33250	4021447856926	1	40
3,5 m x 8 cm	33252	4021447856964	1	12
4 m x 8 cm	33254	4021447857008	1	12
3 m x 10 cm	33251	4021447856940	1	36
3,5 m x 10 cm	33253	4021447856988	1	24
4 m x 10 cm	33255	4021447857022	1	24
5 m x 10 cm	33256	4021447857046	1	24

# La compression médicale dans les affections veineuses chroniques

D'après les recommandations de la HAS<sup>1</sup>

## Indications de la compression médicale

Situation clinique	Dispositifs	Modalités
<b>Varices 3 mm</b> (stade C2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg</li> </ul>	Traitement au long cours
<b>Après sclérothérapie ou chirurgie des varices</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas indiqués pour les varices</li> <li>■ ou bandes sèches à <b>allongement court</b></li> </ul>	4 à 6 semaines
<b>Œdème chronique</b> (stade C3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg</li> <li>■ ou bandes sèches à <b>allongement court</b> ou long</li> </ul>	Traitement au long cours, avec réévaluation régulière du rapport bénéfiques / risques
<b>Pigmentation, eczéma veineux</b> (stade C4a)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg</li> <li>■ ou bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b></li> <li>■ ou bandes enduites</li> </ul>	
<b>Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche</b> (stade C4b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b></li> <li>■ ou bandes enduites</li> <li>■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade chronique)</li> </ul>	
<b>Ulcère cicatrisé</b> (stade C5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou &gt; 36 mmHg</li> <li>■ ou bandes sèches à <b>allongement court</b></li> </ul>	
<b>Ulcère ouvert</b> (stade C6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ bandages multitypes en première intention</li> <li>■ ou bandes sèches inélastiques ou à <b>allongement court</b></li> <li>■ ou bandes enduites</li> <li>■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) &gt; 36 mmHg</li> </ul>	Jusqu'à cicatrisation complète

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

**Les contre-indications absolues de la compression médicale sont<sup>1</sup>** : L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0.6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la *phlegmatia cerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

**Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de<sup>1</sup>** : AOMI avec IPS entre 0.6 et 0.9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

## Les règles d'or d'un bandage compressif

Quelques conseils pour choisir la taille de la bande adéquate :

**Choix de la largeur** : inférieure à la distance entre la base des orteils et le pli de la cheville.

**Choix de la longueur** (pour Velpeau veine plus)

Recouvrement jusqu'au genou	Taille du patient	Longueur
	< 1,65 m	3 m
	Entre 1,65 m et 1,75 m	3,5 m
	> 1,75 m	4 m
	Recouvrement jusqu'à la cuisse	5 m





## Velpeau® press

**Désignation :** Bande de compression cohésive à allongement long.

**Indications :** Maladies veineuses chroniques (œdèmes veineux, dermatoliposclérose et atrophie blanche, ulcère variqueux, varices), maladies veineuses thrombo-emboliques (thrombose veineuse superficielle et profonde, syndrome post-thrombotique), œdèmes (survenant pendant la grossesse, post-traumatiques, post-opératoires, d'origine médicamenteuse).

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Bande de compression cohésive à allongement long en non-tissé. Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau. Sécable à la main et repositionnable.

**Composition :** Polypropylène, élasthanne. Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex<sup>1</sup>.

**Coloris :** Blanc ou chair.

1 : Etiquetage.

### DM Classe I

Codes LPP : 6324330, 6324324

LPP

Dimensions	RÉF. (blanc)	EAN (blanc)	RÉF. (chair)	EAN (chair)	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 7 cm	190448	4004221010660	190449	4004221010684	1	12
3,5 m x 10 cm	190450	4004221010707	190451	4004221010721	1	8



## Porotape®

**Indications :** Immobilisation partielle avec soutien des articulations, des muscles et des ligaments<sup>1</sup>.

Peut également être utilisé en prévention, pour éviter une sollicitation excessive des articulations<sup>2</sup>.

**Caractéristiques :** Sparadrap non élastique. Facilement sécable dans les deux sens, résistant à la traction.<sup>3</sup>

**Coloris :** Blanc.

1 : DF-2016-034. 2 : DF-2016-037. 3 : DF-2016-035.

### DM Classe I

Code LPP : 6323968

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
10 m x 3,8 cm	26816	4056649458937	1	96

Pour plus d'informations consultez :  
[www.Lohmann-Rauscher.com](http://www.Lohmann-Rauscher.com)





## Velveau® strapp

### Bande de compression adhésive élastique.

**Indications :** Traumatologie générale et médecine du sport. Prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations.

**Phlébologie :** traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications.

**Maintien de pansement :** fixation de pansements sur toutes les parties du corps.

**Caractéristiques :** Allongement longitudinal > 50%. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau<sup>1</sup>.

**Coloris :** blanc.

1 : Étiquetage.

#### DM Classe I

Codes LPP : 6324117, 6324100, 6324092, 6324086

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
2,5 m x 3 cm	190438	8428012300345	1	24
2,5 m x 6 cm	190439	8428012300352	1	18
2,5 m x 8 cm	190440	8428012300369	1	12
2,5 m x 10 cm	190441	8428012300376	1	9
2,5 m x 20 cm	190442	8428012300390	1	6
2,5 m x 15 cm	190443	8428012300383	1	6

#### Conditionnement Clubs de sport, collectivités...

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	
2,5 m x 3 cm	190444	8428012300543	60	Non remboursé
2,5 m x 6 cm	190445	8428012300550	30	Non remboursé
2,5 m x 8 cm	190446	8428012300567	30	Non remboursé
2,5 m x 10 cm	190447	8428012300574	30	Non remboursé



# **GAMME BLANCHE ET HYGIÈNE**



Présentoir  
et fiches conseils



Présentoir Cotopads®  
par Velpeau®



# Maintien et fixation

## tg® fix



**Désignation :** Filet tubulaire. Polyamide/élastodiène (= latex). Longueur étirée : 4 m.

**Indications :** Fixation de pansement.

**Caractéristiques :** Larges mailles et élasticité bi-sens<sup>1</sup>, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps.<sup>2</sup> Contient du latex.

**Coloris :** Blanc.

1 : DFC-2021-084. 2 : DFC-2020-147.

### DM Classe I

Code LPP : 6323997

LPP

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>4 m en rouleau</b>			
A doigt	82816	4056649459620	1
B petite extrémité (plusieurs doigts/main/pied)	82825	4056649459637	1
C grande extrémité (petite tête/bras/jambe)	82826	4056649459644	1
D grande tête, petit tronc	82829	4056649459651	1
E grand tronc, hanches, aisselles	82830	4056649459668	1



## Velpeau® pore

**Indications :** Pour la protection et la fixation de pansement.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Sparadrap adhésif non stérile, microporeux, non-élastique, perméable à l'air, avec une bonne adhérence, bonne tenue, bien toléré par la peau<sup>2</sup>. Composé d'un ruban adhésif et d'un dévidoir.

1 : DF-2021-004. 2 : Etiquetage.

### DM Classe I

Codes LPP : 6320504, 6320496

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 m x 2,5 cm	34003	6941558093004	1
9,1 m x 2,5 cm	34004	6941558093011	1

## Velpeau® crêpe sous cello



**Désignation :** Bande de crêpe en coton. Grammage : 100 g/m<sup>2</sup>. 100 % coton blanchi. Extensible en longueur.<sup>1</sup> Disponible sous boîte (consulter le tarif).

**Indications :** Pour la rétention, soutien léger et soulagement.

**Caractéristiques :** Lavable à la main ou en machine à 40 °C (cycle délicat).<sup>2</sup>

**Coloris :** Blanc avec des lisières bleues.

1 : DF-2016-005. 2 : Etiquetage.

### DM Classe I

Codes LPP : 6324554, 6324548, 6324531, 6324519, 6324488

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m x 5 cm	81473	4056649223504	1
4 m x 7 cm	81476	4056649223511	1
4 m x 10 cm	81477	4056649223528	1
4 m x 15 cm	81478	4056649223535	1
5 m x 20 cm	81479	4056649223542	1

## Velpeau® nyl sous cello



**Désignation :** Bande extensible. Polyamide/polyester. Disponible sous boîte (consulter le tarif).

**Indications :** Fixation élastique de pansements, compression légère.

**Caractéristiques :** Allongement 100 %<sup>1</sup>.

**Coloris :** Blanc.

1 : DF-2016-056.

### DM Classe I

Codes LPP : 6324413, 6324407, 6324399, 6324382, 6324376, 6324360, 6324353

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
3 m x 5 cm	81395	4056649223245	20
3 m x 7 cm	81396	4056649223252	20
3 m x 10 cm	81397	4056649223269	20
4 m x 5 cm	81400	4056649223276	20
4 m x 7 cm	81402	4056649223283	20
4 m x 10 cm	81403	4056649223290	20
4 m x 15 cm	81405	4056649223306	20

## Mollelast® haft



**Désignation :** Bande de fixation cohésive. Viscose/polyamide, avec enduction de latex.

**Indications :** Pour la rétention et l'immobilisation.

**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

Codes LPP : 6318571, 6324465, 6324459, 6324436, 6324420

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m x 4 cm	109510	4056649459750	1
4 m x 6 cm	82691	4056649459552	1
4 m x 8 cm	82693	4056649459569	1
4 m x 10 cm	82697	4056649459576	1
4 m x 12 cm	82700	4056649459583	1

# Compresse

## Gazin® compresses de gaze

**Désignation :** Compresse de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 8 plis, sachet de 2.

**Indications :** Soins des plaies et réalisation de pansements.

### DM Classe IIa

Codes LPP : 6323900, 6323891, 6323885, 6323879, 6323862, 6323856

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	98200	4056649519881	40
	7,5 x 7,5	98201	4056649519904	16
	7,5 x 7,5	98202	4021447154695	8
	10 x 10	98203	4056649519928	40
	10 x 10	98204	4056649519942	16
	10 x 10	98205	4021447155043	8

**Désignation :** Compresse de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 16 plis, sachet de 1.

**Indications :** Soins des plaies et réalisation de pansements.

### DM Classe IIa

Non remboursé

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Quantité par carton
Stérile	5 x 5	80641	4056649519287	40
	5 x 5	80653	4056649519348	4



## Vliwasoft® compresses en non-tissé

**Désignation :** Compresse non tissée stérile, 4 plis, 30 g/m<sup>2</sup>, sachet de 2. Viscose/polyester.

**Indications :** Nettoyage et soins des plaies.

### DM Classe Is

Codes LPP : Vliwasoft Compresse en non-tissé 30g S/2 :

6323827, 6323810, 6323804, 6323796, 6323780, 6323773

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	80949	4056649511830	40
	7,5 x 7,5	80960	4056649511892	16
	7,5 x 7,5	80966	4056649511939	8
	10 x 10	80950	4056649511854	40
	10 x 10	80958	4056649511878	16
	10 x 10	80965	4056649511915	8

**Désignation :** Compresse non tissée non stérile, 4 plis, 40 g/m<sup>2</sup>.

**Indications :** Soins des plaies superficielles.

### DM Classe I

Vliwasoft Compresse en non-tissé 40 g : 6323840, 6323833

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Quantité par carton
Non Stérile	7,5 x 7,5	34534	4056649397656	6
	10 x 10	34535	4056649397670	6



# Ophthalmologie



## Rondelle oculaire

**Indications :** Soins ophtalmologiques (nettoyage, protection, absorption).

**Caractéristiques :** Nappe de coton hydrophile maintenue entre deux voiles en gaze hydrophile de coton 17 fils. Bords soudés.

### DM Classe Is

Code LPP : 6319694

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Rondelle oculaire – dimensions 7 x 5,3 cm (forme ovale/Boîte de 10)	98086	4056649512196	1	20

## Pro-ophta® S

**Indications :** Protection de l'oeil, des sécheresses oculaires et après chirurgies de l'oeil.

**Caractéristiques :** Pansement adhésif anatomique avec coquille transparente. 2 tailles disponibles : adulte et enfant.



### DM Classe I

Non remboursé

Taille	Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Enfant	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	4021447022147	1 boîte de 5
Adulte	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	4021447022178	1 boîte de 5

# Coton

## Coton hydrophile



**Désignation :** Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon.

**Indications :** Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.

**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

Code LPP : 6324123

Poids (g)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
<b>Sachet avec cordonnet</b>				
100	34091	4056649512646	1/24	LPP
250	34093	4056649512677	1/10	Non remboursé
50	34090	4056649512615	1/40	Non remboursé

## Boules de coton



**Désignation :** Boules 100 % coton.

**Indications :** Nettoyage de la peau, application de crème ou pommade, absorption des fluides corporels sans plaie ouverte.

**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

Non remboursé

RÉF.	EAN	Conditionnement
31218	4056649511786	20 sachets de 500
31219	4056649511793	16 sachets de 700

## Mouchoirs



**Désignation :** Mouchoirs 100 % cellulose.

**Indications :** Hygiène.

**Coloris :** Blanc.

Non remboursé

RÉF.	EAN	Désignation	Conditionnement
82329	4000883090514	Etuis	48
82385	4000883090484	Boîte distributrice	40

## Cotopads® par Velpeau®



**Désignation :** Carrés et rectangles de coton. 100 % coton.

**Indications :** Pour soins infirmiers et hygiène corporelle : nettoyage de la peau, absorption des fluides corporels en cas de plaies superficielles ou sur sites d'injection.

**Coloris :** Blanc.

### DM Classe I

**Non remboursé**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 5 cm	90000	4056649512806	24 sachets de 500 carrés
8 x 10 cm	90001	4056649512820	16 sachets de 200 rectangles



## CotoBio® par Velpeau®

**Désignation :** Rectangles de coton biologique.\*

**Propriétés :** La toilette de bébé et le démaquillage au naturel. Hygiène, respect de la peau et de l'environnement. Traçabilité des matières premières garantie. Sachet fabriqué à partir de matières recyclées.

Sans utilisation d'OGM / Colorant / Chlore.

**Non remboursé**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
8 x 10 cm	190190	4056649792758	16 sachets de 180 rectangles

\* 100 % des fibres sont issues de l'agriculture biologique.



Nombre de licence: F2000  
LABORATOIRES LIFEPART & FILAUFIL S.A.S

Texte d'origine  
certifié selon par Ecocert Greenlife - F2000



## CotoAccess® par Velpeau®

**Désignation :** Rectangles 50 % coton et 50 % viscose.

**Propriétés :** Hygiène de la peau et toilette de bébé.

**Non remboursé**

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
8 x 10 cm	190191	4056649806646	Sachets de 180 rectangles



## Cototiges par Velpeau®

**Désignation :** Cotons-tiges. Embouts 100 % coton. Bâtonnets en papier.

**Indications :** Hygiène et soins.

**Coloris :** Blanc.

**Non remboursé**

RÉF.	EAN	Conditionnement
190310	4056649931478	24 boîtes de 200 bâtonnets



## Cotodisques par Velpeau®

**Désignation :** Disques de coton 100 % coton.

**Indications :** Soins du visage, démaquillage et nettoyage de la peau.

**Coloris :** Blanc.

**Non remboursé**

RÉF.	EAN	Conditionnement
34822	4056649521358	24 sachets de 80 disques

# Immobilisation



## Cellacast® Xtra

**Indications :** Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.

**Caractéristiques<sup>2</sup> :** Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane. Extensible en largeur pour une application et un façonnage facilités. Légère. Grande stabilité. Perméable à l'air. Transparente aux rayons X.

**Utilisation<sup>1</sup> :** Température de trempage : entre 20 et 24°C.

**Temps de prise<sup>1</sup> :** 2,5 à 5 minutes. Temps de séchage : 30 minutes.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-054.

### DM Classe I

Codes LPP : 6124045, 6124039, 6124022, 6124016, 6124000

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>Emballé individuellement sous sachet</b>			
2,5 x 1,8	190323	4063591112220	Sachet de 10
5 x 3,6	190324	4063591112244	Sachet de 10
7,5 x 3,6	190325	4063591112312	Sachet de 10
10 x 3,6	190326	4063591112336	Sachet de 10
12,5 x 3,6	190327	4063591112435	Sachet de 10

## Cellona® bande plâtrée



**Indications :** Immobilisation des membres blessés ou fracturés.

**Caractéristiques :** Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi. Temps de prise : 3 à 4 minutes.<sup>1</sup>

**Coloris :** Blanc.

1 : DF-2016-043.

### DM Classe I

Codes LPP : 6124074, 6124068, 6124051

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
<b>scellé en emballage individuel</b>				
10 x 2	82386	4056649459484	10	
15 x 2	82387	4056649459491	10	
20 x 2	82388	4056649459507	10	
<b>scellé par 5 unités</b>				
6 x 2	25000	4056649585930	10	<b>Non remboursé</b>

## Cellona® ouate orthopédique



**Indications :** Capitonnage pour la protection des tissus cutanés et des nerfs en regard des saillies osseuses sous les plâtres, résines et sous les bandages de compression.

**Caractéristiques :** Souple et extensible<sup>1</sup>, sécable à la main.

**Coloris :** Blanc.

1 : DF-2016-003.

### DM Classe I

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
2,75 x 5	34585	4021447024196	96
2,75 x 7,5	34586	4021447024202	72
2,75 x 10	34588	4021447024219	48
2,75 x 15	34589	4021447024226	36
2,75 x 20	34590	4021447024233	24

## Jersey côte coton



**Indications :** Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

**Caractéristiques :** Tricot tubulaire à mailles fines. 100 % coton non blanchi. Doux pour la peau<sup>1</sup>, le jersey côtelé est élastique en longueur et transversalement. Il peut être coupé sans s'effiloche<sup>2</sup>.

**Coloris :** Blanc.

1 : DF-2016-044. 2 : DF-2016-045.

### DM Classe I

Codes LPP : 6123985, 6123979

LPP

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
5 x 5	81781	4021447974330	1	
5 x 7	81782	4021447974354	1	
5 x 10	81783	4021447974378	1	
5 x 15	81785	4021447974705	1	<b>Non remboursé</b>
5 x 20	81786	4021447974729	1	<b>Non remboursé</b>



## tg<sup>®</sup> bandage tubulaire

**Indications :** Pour la fixation de pansements.  
Pour la protection de la peau sous plâtres et résines synthétiques.

**Propriétés :** Jersey tubulaire, élastique en largeur<sup>1</sup>.

**Coloris :** Blanc.

<sup>1</sup> : DF-2017-032.

### DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>rouleau de 20 m</b>			
Taille 1 (1,4 cm) doigt, orteil	24000	3401060152314	1
Taille 2 (2,3 cm) doigt, orteil	24001	4021447240015	1
Taille 3 (3,0 cm) plusieurs doigts, bras d'enfant	24002	4021447240022	1
Taille 5 (5,5 cm) bras, mollet, jambe d'enfant	24003	4021447240039	1
Taille 6 (6,5 cm) bras, jambe (moyenne)	24004	4021447240046	1
Taille 7 (7,0 cm) bras (grand), jambe, tête d'enfant	24005	4021447240053	1
Taille 9 (8,5 cm) cuisse (grande), tête, aisselle	24006	4021447240060	1

## Cellona<sup>®</sup> Shoecast

**Indications :** Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en cas d'appareillage plâtré ou de résine.

**Caractéristiques :** Semelle de marche. Large surface de contact avec le sol permettant une stabilité latérale et transversale. Semelle très résistante à l'abrasion. Mousse intérieure absorbant les chocs. Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-adhérentes permettant un soutien adapté<sup>1</sup>. Protège également de l'humidité et de la saleté.<sup>2</sup>

**Coloris :** Noir.

<sup>1</sup> : DF-2016-038. <sup>2</sup> : DF-2016-039.



### DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
<b>pour enfant</b>			
Taille 0, gauche, (pointure 32-35)	50858	4021447508580	1
Taille 0, droite	50859	4021447508597	1
<b>pour adulte</b>			
Taille 1, gauche, (pointure 36-38)	50860	4021447508603	1
Taille 1, droite	50861	4021447508610	1
Taille 2, gauche, (pointure 39-42)	50862	4021447508627	1
Taille 2, droite	50863	4021447508634	1
Taille 3, gauche, (pointure 43-46)	50864	4021447508641	1
Taille 3, droite	50865	4021447508658	1
Taille 4, gauche, (pointure > 46)	50869		1
Taille 4, droite	50870		1

## Découvrez nos masques !

Plus d'informations auprès de votre délégué ou de votre service client.



## Gant vinyle Sempercure® Vinyl Non poudré, non stérile

**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques' :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface lisse, longueur médiane 240 mm. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel et sans accélérateur.

**Coloris :** Transparent.

1 : DF-2016-141.



### DM Classe I - EPI Cat. I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	34766	9001570518606	Boîte de 100
6/7 S	45010	9001570506771	Boîte de 100
7/8 M	45011	9001570506788	Boîte de 100
8/9 L	45012	9001570506795	Boîte de 100
9/10 XL	48468	9001570506801	Boîte de 90

## Gant vinyle Sempercure® Syn-stretch Non poudré, non stérile

**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques' :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface lisse et une longueur médiane de 240 mm, plus élastiques que les gants vinyle classiques. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel et sans accélérateur.

**Coloris :** Écru.

1 : DF-2016-142.



### DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
6/7 S	39488	9001570510150	Boîte de 100
7/8 M	39487	9001570510167	Boîte de 100
8/9 L	39486	9001570510174	Boîte de 100
9/10 XL	39489	9001570510181	Boîte de 90

## Gant latex Sempercure® Edition Non poudré, non stérile



**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.

**Coloris :** Blanc écru.

1 : DF-2016-139.

### DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	152240	9001570519757	Boîte de 100
6/7 S	152241	9001570519764	Boîte de 100
7/8 M	152242	9001570519771	Boîte de 100
8/9 L	152243	9001570519788	Boîte de 100
9/10 XL	152244	9001570519795	Boîte de 90

## Gant nitrile Sempercure® Velvet Non poudré, non stérile



**Indications :** Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

**Coloris :** Bleu lavande.

1 : DF-2017-018.

### DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	106401	9001570532701	Boîte de 200
6/7 S	106402	9001570532732	Boîte de 200
7/8 M	106403	9001570532749	Boîte de 200
8/9 L	106404	9001570532817	Boîte de 200
9/10 XL	106405	9001570532824	Boîte de 180

## tg® gants Non stériles



**Indications :** Gants en coton pour mains sensibles.

**Caractéristiques<sup>1</sup> :** Forme anatomique, polyvalents, stérilisables, 100% coton.

**Coloris :** Écru.

1 : Étiquetage.

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
enfant	24749	4021447247496	1 paire
6-7	24750	4021447247502	1 paire
7,5-8,5	24751	4021447247519	1 paire
9-10	24752	4021447247526	1 paire

# INCONTINENCE



iD est l'une des marques phares du groupe Ontex, un fabricant de soins de santé de pointe essentiellement axé sur l'innovation, la technologie et les programmes de recherche.



- p.48** Protections anatomiques
- p.49** Sous-vêtements absorbants
- p.50** Changes complets
- p.51** Alèses
- p.51** Slips de maintien



Femmes ♀

Petits inconforts • Faiblesse de vessie



Technique de pose :



## iD Light Advanced

Les protections **iD Light Advanced** ont été conçues pour protéger les femmes des **petits inconforts et des fuites urinaires passagères**, légères à modérées. Semblables à des protections hygiéniques, elles sont plus absorbantes tout en garantissant **discrétion et confort au quotidien**.

Avantages du produit :

-  30 % plus fin que précédemment, mais offrant toujours la même protection avancée.
-  Conçue en prenant en compte la forme de sous-vêtements féminins. Elle épouse vos mouvements et vous pouvez oublier que vous portez une protection.
-  Notre nouveau système patenté de protection des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs et vous offre une sensation de fraîcheur jusqu'à 10 heures d'affilée.
-  Une rétention maximale de liquide en une courte période de temps, offrant ainsi une sensation exacerbée de sécheresse.
-  Une double barrière anti-fuite, spécialement conçue pour vous offrir une double protection contre toute fuite, et vous permettant ainsi de mener une vie active.
-  Un système de mouvement intégré qui donne à la protection une flexibilité sans précédent, lui permettant de s'adapter aux mouvements les plus extrêmes.

Hommes ♂

Faiblesse de vessie

Sachets en cours de modification



## iD for Men

Les **protections iD For Men** sont dédiées aux hommes souffrant d'incontinence légère à modérée. Leur technologie permet une **adaptation à l'anatomie masculine**. La bande adhésive et les côtés élastifiés assurent un **bon maintien au quotidien**, alliant **sécurité et confort**. iD for Men Level 2 est emballé individuellement.

Avantages du produit:


-  Conçue pour une liberté totale de mouvement.
-  Bloque les odeurs pour un maximum de fraîcheur.
-  Absorption rapide et maximale.
-  Matériaux doux pour un réel confort.

Hommes / Femmes ♀♂


Faiblesse de vessie • Incontinence



Technique de pose en position debout :

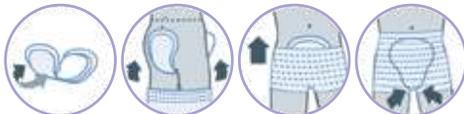

Technique de pose en position couchée :

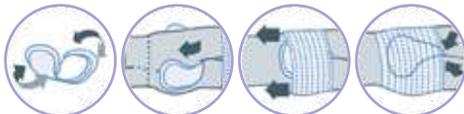

## iD Form

Les **protections anatomiques iD Form** sont idéales pour les personnes mobiles ou dépendantes souffrant d'incontinence modérée à sévère. Son voile doux et ses nombreux niveaux d'absorption allient **confort et sécurité** en restant **au sec toute la journée**. Un double indicateur d'humidité **facilite le change au bon moment**.

Avantages du produit:

-  La protection est 100% respirable.
-  Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
-  Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
-  Approuvé par les dermatologues.
-  Le témoin d'humidité vous indique quand le produit doit être changé.
-  Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales.
-  Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniac et donc, d'odeurs embarrassantes.

Femmes



Faiblesse de vessie • Incontinence




## iD Intime

Les **culottes absorbantes jetables iD Intime** sont une gamme consacrée aux **femmes actives** souffrant de fuites urinaires modérées. Très féminines et discrètes et conçues comme de **véritables sous-vêtements**, iD Intime se porte et s'enlève de la même manière. Ces culottes allient une **absorption renforcée et une discrétion totale** pour continuer à profiter pleinement du quotidien.

### Avantages du produit :

- Contrôle les odeurs.
- Absorbe 8 x son propre poids.
- Coupe parfaite - s'adapte parfaitement.
- Barrière anti-fuites.

### Technique de pose (iD intime & iD Pants) :

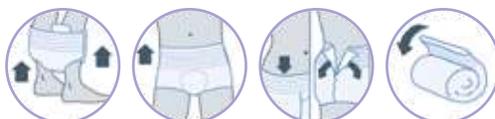

Hommes / Femmes



Faiblesse de vessie • Incontinence



## iD Pants

Les **culottes jetables iD Pants** sont dédiées aux personnes actives rencontrant des épisodes d'incontinence moyenne à sévère. Conçues comme de **véritables sous-vêtements**, elles s'enfilent et s'enlèvent de la même manière. Cette culotte **douce et 100% respirable** protège votre peau tout au long de la journée, grâce à son voile intérieur enrichi en ingrédients naturels. **Faciles d'utilisation, confortables et discrètes**, les culottes iD Pants permettent de profiter pleinement de la vie. **Approuvé par les dermatologues.**

### Avantages du produit :

- Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniac et donc, d'odeurs embarrassantes.
- Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
- La protection est 100% respirable.
- Le Top Sheet est respectueux de la peau pour la zone sensible. Ce voile est composé d'ingrédients naturels pour le confort de votre peau.
- Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
- La forme du produit, combinée aux élastiques, assure une adaptation anatomique pour un confort et une discrétion optimales.
- Approuvé par les dermatologues.

Pour choisir le produit le plus adapté et trouver sa référence, reportez-vous à l'arbre décisionnel pages 52 - 53



Hommes / Femmes



Incontinence

## iD Slip

Les protections **iD Slip** sont des **changes complets** qui apportent une solution efficace lors d'incontinence modérée à forte. Les attaches adhésives de la couche permettent de repositionner le produit pour un confort optimal et une **sécurité garantie**. Ses barrières anti-fuites et son double indicateur d'humidité assurent un **maintien au sec** et un change au bon moment. Leur sensation coton procurent un sentiment de douceur. **Approuvé par les dermatologues.**


### Avantages du produit :

-  Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.
-  La protection est 100% respirable.
-  Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
-  Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
-  Le témoin d'humidité vous indique quand le produit doit être changé.
-  Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales.
-  Approuvé par les dermatologues.


### DM Classe I

Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	EAN13	ACL 7	RÉF.
Super	XS	40-70 cm	14	5141874003251	5398504	190540
Super	S	50-90 cm	14	5414874003299	5398705	190541
Super	M	80-125 cm	15	5414874010488	6257647	190542
Super	L	115-155 cm	15	5414874010501	6257646	190543
Super	XL	120-170 cm	14	5414874003596	5398579	190544
Maxi	XL	120-170 cm	15	5141874007013	6044860	190029
Maxi Prime	M	80-125 cm	15	5414874009386	6079806	190027
Maxi Prime	L	115-156 cm	15	5414874009409	6079805	190028

### Technique de pose position debout :

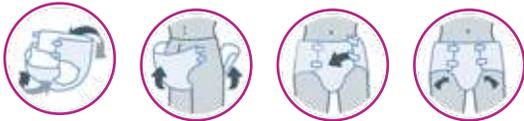

### Technique de pose position couchée :

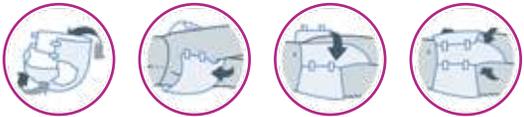



## iD Protect / Expert Protect

Les alèses **iD Protect et Expert Protect**, jetables, offrent une protection complémentaire aux produits d'incontinence. Elles permettent de garder la literie et les fauteuils au sec. Elles sont composées d'un coussin de fluff et d'un gaufrage qui permettent une diffusion idéale et une absorption rapide des liquides. Son voile non tissé **procure une douceur au toucher**.

### Avantages du produit :

Ses nombreuses tailles assurent une parfaite adaptabilité sur tous vos supports.

-  Tous nos produits sont sans latex.
-  Testée dermatologiquement.

Hommes / Femmes 

Produit complémentaire

### DM Classe I

Absorption	Dimensions	Quantité par sachet	EAN13	ACL7	Réf. Ontex	REF L&R
Expert Protect Plus	40*60 cm	30	5414874003954	5396244	5800460300	31817
Protect Plus	60*90 cm	30	5414874009871	6112712	5801960300	190033
Protect Super	60*60 cm	30	5414874009857	6112713	5801672300	190034
Protect Super	60*90 cm	30	5414874009918	6112710	5801975300	190048
Expert Protect Super	90*180 cm	20	5414874004098	5396356	5800075200	31824



## iD Expert Fix confort super

Les slips de maintien **iD Expert Fix** permettent le maintien contre le corps de la protection d'incontinence utilisée. Composés de fibres douces, ce slip assure un **confort optimal** dans tous les mouvements. De plus, ils sont **disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à la morphologie** de chacun. Sa matière, douce et extensible, procure **un maximum de confort**.

### Avantages du produit :

Ses nombreuses tailles assurent une parfaite adaptabilité sur tous vos supports.

-  sans latex.
-  doux et confortables.
-  très extensibles.
-  lavables à 60°.
-  sans coutures (hors entrejambe).

Hommes / Femmes 

Produit complémentaire

### DM Classe I

Taille	Tour de taille		EAN13	ACL7	Réf. Ontex	REF L&R
M	60-100 cm	5	5414874002612	5445385	5410200050	32473
L	80-120 cm	5	5414874002636	5440749	5410300050	32474
XL	100-160 cm	5	5414874002650	5445379	5410400050	32475

Petits Inconforts

<p>Vous avez quelques fuites quand vous tousssez, riez, éternuez ou lorsque vous effectuez un effort physique ?</p>	<p>C'est très irrégulier, j'utilise parfois des serviettes hygiéniques féminines, mais je recherche une solution plus adaptée.</p> <p>C'est régulier et j'ai quelques fuites plusieurs fois par jour.</p>	♀	Si vos fuites sont occasionnelles et irrégulières.	
		♀	Si vos fuites sont irrégulières, mais que cela peut arriver tous les jours.	
		♀	Fuites occasionnelles en éternuant ou en toussant entraînant une sensation d'humidité.	
		♀	Nouvelle génération de protections offrant 10 h de fraîcheur et de liberté de mouvement tout en absorbant 8 fois son propre poids.	

Faiblesse De Vessie

<p>Vous avez parfois de légères fuites et des accidents ? Il vous arrive parfois de ne pas arriver aux toilettes à temps ?</p> <p>Mes fuites ont augmenté. J'ai de plus en plus de petits accidents. Parfois, j'ai des fuites avant même d'avoir le temps de me dire que je dois aller aux toilettes.</p>	<p>Vos accidents sont réguliers ?</p>	♀	Je préfère des protections ANATOMIQUES.	
		♀	Je préfère un produit de type SOUS-VÊTEMENT.	
		♂	Il m'arrive de temps en temps de perdre quelques gouttes plusieurs fois en une journée.	
		♂	Je suis souvent en déplacement et je ne peux pas accéder facilement à des toilettes. Les accidents surviennent de jour comme de nuit.	
		♀	Je préfère utiliser une protection qui ressemble à un SOUS-VÊTEMENT pour plus de discrétion et de féminité.	
		♀	Je préfère utiliser des PROTECTIONS ANATOMIQUES (pour plus de sécurité, confort et douceur).	
♂	Je préfère utiliser une protection qui ressemble à un SOUS-VÊTEMENT pour le côté pratique et un maximum de confort.			

Incontinence

<p>Contrôle très limité de la vessie et difficultés à aller aux toilettes à temps, les accidents arrivent parfois la nuit.</p>	<p>Je suis toujours actif et je peux aller aux toilettes seul.</p>	♂	Je préfère des protections ANATOMIQUES.	
		♂	Je préfère des protections ANATOMIQUES.	
		♂	Je préfère des protections ANATOMIQUES.	
		♂	Je préfère utiliser des protections semblables à un SOUS-VÊTEMENT pour me permettre d'aller facilement aux toilettes.	
		♂	Je préfère utiliser des protections semblables à un SOUS-VÊTEMENT pour me permettre d'aller facilement aux toilettes.	

## DM Classe I

		Taille	Tours de taille	Quantité par sachet	EAN13	Réf. Ontex	REF L&R
iD Light Advanced Ultra Mini		Protection anatomique		28	5414874001974	5111010281	109330
iD Light Advanced Mini		Protection anatomique		20	5414874001998	5121020201	190532
iD Light Advanced Mini Plus		Protection anatomique		16	5414874002018	5171025161	190531
iD Light Advanced Normal		Protection anatomique		12	5414874002032	5171030121	109333
iD Light Advanced Extra		Protection anatomique		10	5414874002056	5171040101	109334
iD Light Advanced Maxi		Protection anatomique		10	5414874002070	5171055101	109335
iD Intime Normal		M	80-110 cm	12	5414874009567	5551255120	190042
		L	100-135 cm	10	5414874009628	5551355100	190043
iD for Men Level 2		Protection anatomique		10	5414874005675	5221040100	32789
iD for Men Level 3		Protection anatomique		14	5414874007914	5231050140	108901
iD Intime Plus		M	80-110 cm	12	5414874009581	5551265120	190044
		L	100-135 cm	10	5414874009642	5551365100	190045
iD Intime Super		M	80-110 cm	12	5414874009604	5551275120	190046
		L	100-135 cm	10	5414874009666	5551375100	190047
iD Form Normal		Protection anatomique		28	5414874002193	5310155280	32467
iD Form Plus		Protection anatomique		21	5414874002230	5310260210	190533
iD Pants Plus		XS	50-70 cm	14	5414874004135	5531065141	31807
		S	60-90 cm	14	5414874002797	5531165140	31808
		M	80-120 cm	14	5414874002858	5531265140	31810
		L	100-145 cm	14	5414874002933	5531365140D	31811
		XL	130-170 cm	14	5414874002971	5531465140	31812
iD Form Extra		Protection anatomique		21	5414874002254	5310265210	190534
iD Form Super		Protection anatomique		21	5414874002315	5310275210	32470
iD Form Maxi		Protection anatomique		21	5414874002353	5310380210	32471
iD Pants Super		M	80-120 cm	12	5414874010280	5531275120	190535
		L	100-145 cm	12	5414874010327	5531375120D	190536
iD Pants Maxi		XL	130-170 cm	12	5414874010303	5531475120	190537
		M	80-120 cm	10	5414874010341	5531280100	190538
		L	100-145 cm	10	5414874010365	5531380100	190539

# Informations

Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, les informations concernant les dispositifs médicaux de classe I (non-stérile) sont susceptibles d'être modifiées, après le 26 Mai 2021.

Dans le cadre du Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l'identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, nos codes LPP sont susceptibles d'être modifiés au cours de l'année.

## Mentions légales

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), sauf mouchoirs, cotobio, cotoaccess, cotodisques, cototiges, tg° gants non stérile. Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus d'informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant).

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Evaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I. Exceptions faites pour les produits suivants :

- Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Airstep® Walker, Velpeau® Abdominal Classic, fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd.
- Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite border, multisite border lite, heel, sacrum, non border, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Lohmann & Rauscher Medical UK Ltd. Évaluation de conformité réalisée par BSI (CE2797).
- Velpeau® Set Post-opérateur, Velpeau® Set Standard, Velpeau® Set Détertion, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux. Assembleur : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.
- Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH.
- Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s.a.
- Velpeau® Thorax Classic fabriqué par Intex.s.a.
- Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co.Ltd.
- Cellacast® Xtra, fabriqué par T&L Co., Ltd.
- Suprasorb® H fabriqué par T&L Co. Ltd., évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- iD Light, iD Intime, iD for Men, iD Pants, iD Slip, iD Protect, iD Expert Protect alèse, iD Form et iD Expert Fix Comfort Super fabriqués par Ontex BVBA.
- Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co., Ltd.
- Gants d'examen Sempercure®, fabriqués par Semperit Investments Asia Pte Ltd.

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Les gants d'examen Sempercure® sont des équipements de protection individuelle (EPI).

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

Velpeau® genouillère anatomique, Velpeau® genouillère Laxilatéral, Velpeau® genouillère Ligaction, Velpeau® genouillère articulaire, Velpeau® Genu, Velpeau® cheville anatomique, Velpeau® cheville Laxilatéral, Velpeau® cheville Ligaction, Velpeau® cheville articulaire sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les chevillères, genouillères et cuissards de compression.

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention.

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme, et City 3 sont certifiées ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres.

Consulter [www.asqual.com](http://www.asqual.com)



### Laboratoires Lohmann & Rauscher

ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France

Tél. : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07

E-mail : [LRmed@fr.LRmed.com](mailto:LRmed@fr.LRmed.com)

SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091

Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015